

Gebrauchsanweisung

Cavex ExSense

CE 0197

Produktbeschreibung

Cavex ExSense ist die perfekte Lösung für empfindliche Zähne. Empfindliche Zähne entstehen oft durch Zahnerosion oder freiliegendes Dentin. Cavex ExSense basiert auf 2 % Hydroxylapatit, das die Tubuli und Mikrorisse im Zahnschmelz mithilfe eines hydrodispergierenden Sols versiegelt. Dabei werden sensible Bereiche vollständig abgeriegelt. Durch die Zugabe von 0,1 % Kaliumnitrat wird zudem die Mikrohärtigkeit wiederhergestellt. Neben dem vollständigen Verschluss findet eine Kristallisation statt, die den Remineralisierungsprozess unterstützt und beschleunigt.

Cavex ExSense ist in einer Tube (42 ml – 50 Gramm) erhältlich, ausreichend für etwa 20 Behandlungen. Je nach Art der Empfindlichkeit kann das Produkt auf verschiedene Arten angewendet werden. Die effektivste Methode besteht darin, eine speziell angefertigte Schiene zu verwenden, die mit Cavex ExSense gefüllt ist, und die Zähne dann 10 Minuten lang „baden“ zu lassen. Bei lokaleren Beschwerden kann Cavex ExSense auch sehr effektiv mit der Fingerspitze auf die empfindliche Stelle aufgetragen werden. Anschließend wird die Schiene und der Überschuss entfernt und die Schiene mit Wasser ausgespült. Der Eingriff sollte 10 Tage lang oder nach Anweisung eines Zahnarztes wiederholt werden.

Zusammensetzung

Hauptbestandteile: Hydroxylapatit 2 %, Kaliumnitrat 0,1 %

Verwendungszweck

Zahndesensibilisatoren wie Cavex ExSense werden in der Zahnarztpraxis eingesetzt, um Schmerzen durch freiliegende Zahnhälse oder Dentin zu lindern und postoperative Empfindlichkeiten zu verhindern oder zu lindern.

Hinweis zur Verwendung

Cavex ExSense basiert auf 2 % Hydroxylapatit, das die Tubuli und Mikrorisse im Zahnschmelz mithilfe eines hydrodispergierenden Sols versiegelt. Dabei werden sensible Bereiche vollständig abgeriegelt. Durch die Zugabe von 0,1 % Kaliumnitrat wird zudem die Mikrohärtigkeit der Zähne wiederhergestellt. Neben dem vollständigen Verschluss findet eine Kristallisation statt, die den Remineralisierungsprozess unterstützt und beschleunigt.

- Vorbeugung und Reduzierung von Zahneempfindlichkeit.
- Nach der Zahnaufhellung in der Zahnarztpraxis und/oder zu Hause.
- Nach professioneller Zahnreinigung.

Kontraindikationen und Warnungen

Kontraindikationen

Nicht verwenden, wenn Sie allergisch gegen Minze oder einen der anderen Inhaltsstoffe sind.

Mögliche Nebenwirkungen

Überempfindlichkeiten gegen das Produkt oder seine Bestandteile können im Einzelfall nicht ausgeschlossen werden.

Lagerbedingungen

Bei Temperaturen zwischen 0 °C (32 °F) und 25 °C (77 °F) lagern.
An einem kühlen und trockenen Ort (frostfrei) und vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt lagern.
Verschließen Sie die Tube nach Gebrauch immer fest. Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.

Warnungen

Bei Kontakt mit den Augen gründlich mit viel Wasser ausspülen und einen Arzt aufsuchen.
Verwenden Sie das Produkt nach Ablauf des Verfallsdatums nicht mehr.

Handhabung

Reinigen Sie Ihre Zähne vorher durch Zähneputzen und Zahnseide.

Anwendung ohne Schiene

Hände gründlich mit Wasser und Seife waschen. Geben Sie eine kleine Menge Cavex ExSense auf einen sauberen Finger und tragen Sie es auf die oberen und unteren Zähne auf. Lassen Sie das Gel 10 Minuten einwirken. Überschüssiges Gel ausspucken, aber anschließend nicht ausspülen.

Mit Schiene

Verteilen Sie eine kleine Menge Cavex ExSense über die gesamte Schiene. Platzieren Sie die Schiene im Mund und bewegen Sie die Schiene ein wenig von links nach rechts, um das Gel auf den Zähnen zu verteilen. Beißen Sie vorsichtig auf die Schiene und lassen Sie die Schiene mit dem Gel 10 Minuten lang einwirken. Entfernen Sie die Schiene und spucken Sie überschüssiges Gel aus, spülen Sie es anschließend nicht aus. Spülen Sie die Schiene mit kaltem Wasser aus.

- Verschließen Sie die Tube immer sofort nach Gebrauch mit der Kappe.
- Für beste Ergebnisse: Mindestens 30 Minuten nach der Anwendung nichts trinken oder essen.
- Verwenden Sie Cavex ExSense mindestens 10 Tage lang einmal täglich oder befolgen Sie die Anweisungen Ihres Zahnarztes.

Beschriftung

Diese Informationen entsprechen ISO24234 und auch der europäischen Gesetzgebung.

Beabsichtigte(r) Patient(en)

Cavex ExSense ist für Patienten geeignet, die eine zahnärztliche Behandlung bei den folgenden Indikationen unter Berücksichtigung der Kontraindikationen benötigen. Für schwangere und stillende Frauen müssen die Behandlungsrisiken sorgfältig gegen den Nutzen unter Berücksichtigung des ungeborenen Kindes bzw. Säuglings abgewogen werden.

Beabsichtigte Anwender/-in

Cavex ExSense darf nur von Zahnärztinnen & Zahnärzte verwendet werden.

Klinische Vorteile

Desensibilisator auf Basis von biokompatiblen Hydroxylapatit mit einfacher Anwendung für den Einsatz im Büro und zu Hause.

Wirksamkeit

- Sofortige und langanhaltende Linderung empfindlicher Zähne
- Hilft empfindlichen Zähnen vorzubeugen
- Beschleunigt und verstärkt den Remineralisierungsprozess

Produkteigenschaften und Spezifikationen

Derzeit ist kein Produktstandard für Cavex ExSense verfügbar. Daher erfolgt die Qualitätskontrolle nach einer Reihe hausinterner Standards.

Charakteristische interne Spezifikationen Cavex ExSense

Karakteristik	Interne Spezifikationen	Cavex ExSense	
Aussehen	Weißes Gel	Weißes Gel	
pH-Wert	7,5 – 9	8,5 - 9	
Viskosität	5 - 100	5 – 30	Pa.s.

Kombinationsprodukte

Cavex ExSense kann als einzelnes Produkt verwendet oder mit einer Schiene (d. h. einer individuellen Aligner-Schiene oder einer Standard-Tiefziehschiene) angewendet werden.

Wichtiger Hinweis

Gemäß der EU-Medizinprodukteverordnung sind Anwender/Patienten verpflichtet, schwerwiegende Vorfälle mit einem Medizinprodukt dem Hersteller und der zuständigen Behörde des Landes, in dem sich der Vorfall ereignet hat, zu melden.

Hinweise zur Lagerung

Nicht bei Temperaturen über 25 °C (77 °F) lagern. Verwenden Sie dieses Material nicht nach Ablauf des Verfallsdatums. Vermeiden Sie direkte Sonneneinstrahlung. Tube nach Gebrauch gut verschließen und außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.

Informationen zur Entsorgung

Gemäß den örtlichen Vorschriften entsorgen. Entsorgen Sie den Inhalt oder die teilweise entleerte Verpackung nicht im Hausmüll und lassen Sie sie nicht in die Kanalisation gelangen.

Cavex Holland BV | Hergestellt in den Niederlanden

Fustweg 5 | NL 2031CJ Haarlem | T +31 23 5307700 | dental@cavex.nl

Unsere technische Beratung, sei es mündlich, schriftlich oder anhand von Studien, erfolgt nach bestem Wissen, jedoch ohne Gewähr, auch wenn Schutzrechte Dritter betroffen sind. Sie entbinden Sie nicht von der Verpflichtung, die von uns gelieferten Produkte auf ihre Eignung für die vorgesehenen Verfahren und Verwendungszwecke zu prüfen. Anwendung, Verwendung und Verarbeitung der Produkte erfolgen außerhalb unserer Kontrollmöglichkeiten und liegen daher ausschließlich in Ihrem Verantwortungsbereich. Sollte dennoch eine Haftung für einen Schaden festgestellt werden, ist diese auf den Wert, der von uns gelieferten und von Ihnen verwendeten Waren begrenzt. Eine gleichbleibende Qualität unserer Produkte gewährleisten wir selbstverständlich im Rahmen unserer Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen.