


# Gesamtkatalog 2025

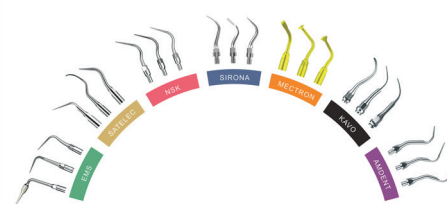

Multifunktions-Ultraschallspitzen für alle Anwendungen  
Mit Herstellergarantie



#### Vertrieb durch:

##### Dental Contact Vertriebs KG

Im Spiet 101  
D 26506 Norden  
Telefon 04931 9809681

info@dental-contact.de  
www.dental-contact.de



##### Dental Contact Vertriebs KG

Hauptstraße 52  
AT 2381 Laab im Walde  
Telefon 0676 4655990

info@dental-contact.at  
www.dental-contact.at



## Inhaltsverzeichnis

<b>Xpedent Multifunktions-Ultraschallspitzen .....</b>	
Funktion und Anwendung – Herstellergarantie auf Passgenauigkeit .....	
Scaling Spitzen .....	1
Parodontologie .....	2
Endodontie .....	4
Kronenentferner .....	5
Kavitätenpräparation .....	6
Implantatreinigung .....	6
Passende Spitzen für Scaler Geräte .....	7
Passend für EMS® Scaler Geräte .....	7
Passend für Satelec® Scaler Geräte .....	8
Passend für NSK® Scaler Geräte .....	12
Passend für Sirona® Scaler Geräte .....	13
Passend für KaVo® Scaler Geräte .....	14
Passende Spitzen für KaVo® SONICflex® & KOMET® Sonicline®, chirurgische Spitzen .....	16
Passende Spitzen für chirurgische Geräte .....	20
Passend für MECTRON® chirurgische Geräte .....	20
Passend für EMS® chirurgische Geräte .....	26
Passend für Satelec® chirurgische Geräte .....	28
Drehmomentschlüssel & Zubehör .....	30
U-Feilen .....	31
Handstücke .....	31
Scaler-Geräte .....	32



Xpedent Scaler-Spitzen werden aus hochwertigen Materialien hergestellt. Sie sind stark, belastbar, korrosionsbeständig und bieten eine angemessene Lebensdauer der Spitze. Die mit japanischen 7-Achsen-CNC-Maschinen hergestellten Spitzen durchlaufen bis zu 30 zusätzliche Prozesse und Kontrollen, um die korrekte Funktion zu gewährleisten. Xpedent stellt Scaler-Spitzen für führende Marken her.

### Funktionsprinzip

Bei Spitzen im Piezo-Stil, einschließlich aller Xpedent-Spitzen, wird die Leistung durch die Ultraschallschwingung piezoelektrischer Kristalle erzeugt. Dadurch entsteht eine sinusförmige Bewegung mit der größten Kraft (Amplitude) am Ende der Spitze. So ist eine sinuswellenartige Kraftverteilung entlang der Spitze möglich. Die Wirkung der Spitze hängt daher stark von dem Teil der Spitze ab, der den Zahn berührt.

Die ideale Leistungseinstellung hängt von der verwendeten Spitze und dem Zustand des zu behandelnden Bereichs ab. Endo- und Perio-Arbeiten haben längere, dünnere Spitzen als Scaling Spitzen, daher sind geringere Stärken empfohlen. Beginnen Sie immer mit einer niedrigen Leistung und steigern Sie diese schrittweise, um die Wirksamkeit zu maximieren und Beschwerden für den Patienten zu vermeiden.

### Orientierung und Anwendung

Um eine Kombination aus Patientenkomfort und effizientem Scaling zu erzielen, ist es wichtig, die Seite der Spitze am zweiten Leistungsband und in einem sehr flachen Winkel zum Zahn zu verwenden. Ein zu großer Winkel bringt die Spitze des Zahns in Kontakt mit der Scalerspitze und führt zu Beschwerden für den Patienten.

Im Gegensatz zum manuellen Scaling erfordert das Ultraschall-Scaling nur eine sehr sanfte Berührung der Zahnoberfläche. Der Ultraschall liefert die ganze Kraft, sodass die Anwendenden die Spitze nur sehr sanft um den zu behandelnden Bereich führen muss. Das Entfernen harter Ablagerungen kann beschleunigt werden, indem das Ende der Spitze dort angebracht wird, wo die Vibrationen am stärksten sind. Dies führt dazu, dass sich Zahnstein vom Zahn löst.



**XPEDENT garantiert**, dass die Passgenauigkeit der Gewinde jeder einzelnen Spitze geprüft wird, bevor sie das Werk verlässt. Auf diese Weise stellen sie sicher, dass das Gewinde auf dem Handstück nicht deformiert und folglich unbrauchbar wird. Sollte sich dennoch einmal herausstellen, dass das Gewinde einer XPEDENT Ultraschallspitze das Gewinde eines Handstückes deformiert hat, übernimmt XPEDENT Reparatur oder Ersatz.

EMS® ist ein eingetragenes Warenzeichen der E.M.S. Electro Medical Systems S.A., Schweiz

NSK® ist ein eingetragenes Warenzeichen der NSK Europe GmbH, Deutschland

Sirona® ist ein eingetragenes Warenzeichen der Dentsply Sirona Deutschland GmbH, Deutschland

Satelec® ist ein eingetragenes Warenzeichen der Satelec GmbH / Acteon, Deutschland

Komet® Sonoline® ist ein eingetragenes Warenzeichen der Komet Dental Deutschland

KaVo® ist ein eingetragenes Warenzeichen der KaVo Dental GmbH, Deutschland


SONICflex® ist ein eingetragenes Warenzeichen der KaVo Dental GmbH, Deutschland

PIEZOLux & SONOsoft® ist ein eingetragenes Warenzeichen der KaVo Dental GmbH, Deutschland

Mectron® ist ein eingetragenes Warenzeichen der mectron Deutschland Vertriebs GmbH, Deutschland


## Scaling

Zur Entfernung von leichtem und mittlerem supragingivalem Zahnstein und Plaque.

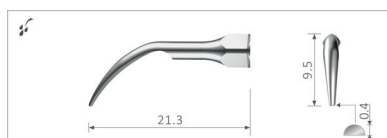


Art.Nr.	Passend	Anzahl	Preis
G1	Passend für EMS®	1 Stück	19,90€
GS1	Passend für SIRONA®	1 Stück	19,90€
GN1	Passend für NSK®	1 Stück	19,90€
GD1	Passend für SATELEC®	1 Stück	19,90€
GM1	Passend für MECTRON®	1 Stück	19,90€

Mit flacher Kante zur Entfernung von schwerem supragingivalem Zahnstein.

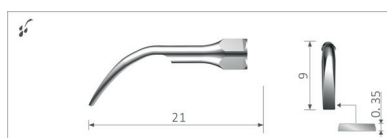


Art.Nr.	Passend	Anzahl	Preis
G2	Passend für EMS®	1 Stück	19,90€
GS2	Passend für SIRONA®	1 Stück	19,90€
GN2	Passend für NSK®	1 Stück	19,90€
GD2	Passend für SATELEC®	1 Stück	19,90€

Zur Entfernung von Zahnstein und Plaque aus supragingivalen Interdentalbereichen.

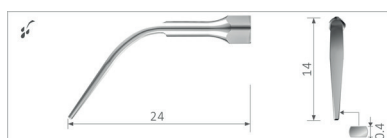


Art.Nr.	Passend	Anzahl	Preis
G3	Passend für EMS®	1 Stück	19,90€
GS3	Passend für SIRONA®	1 Stück	19,90€
GN3	Passend für NSK®	1 Stück	19,90€
GD3	Passend für SATELEC®	1 Stück	19,90€
GM3	Passend für MECTRON®	1 Stück	19,90€

Zur Entfernung von supragingivalem Zahnstein und ursprünglichem Plaque.

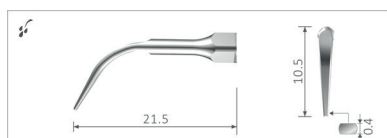


Art.Nr.	Passend	Anzahl	Preis
G4	Passend für EMS®	1 Stück	19,90€
GS4	Passend für SIRONA®	1 Stück	19,90€
GN4	Passend für NSK®	1 Stück	19,90€
GD4	Passend für SATELEC®	1 Stück	19,90€
GM4	Passend für MECTRON®	1 Stück	19,90€

Zur Entfernung von supragingivalem Zahnstein und Plaque.

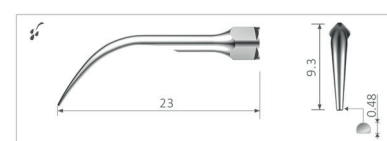

Art.Nr.	Passend	Anzahl	Preis
G5	Passend für EMS®	1 Stück	21,00€
GS5	Passend für SIRONA®	1 Stück	21,00€
GN5	Passend für NSK®	1 Stück	21,00€
GD5	Passend für SATELEC®	1 Stück	21,00€
GM5	Passend für MECTRON®	1 Stück	21,00€


Mit flacher Kante zur Entfernung von schwerem supragingivalem Zahnstein.

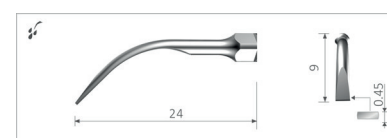

Art.Nr.	Passend	Anzahl	Preis
G6	Passend für EMS®	1 Stück	21,00€
GN6	Passend für NSK®	1 Stück	21,00€
GD6	Passend für SATELEC®	1 Stück	21,00€
GM6	Passend für MECTRON®	1 Stück	21,00€




## Parodontologie

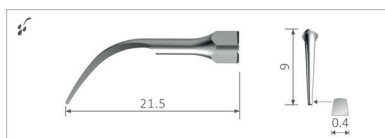


Zur Entfernung von subgingivalem Zahnstein.

Art.Nr.	Passend	Anzahl	Preis
P1	Passend für EMS®	1 Stück	24,00€
PS1	Passend für SIRONA®	1 Stück	24,00€
PN1	Passend für NSK®	1 Stück	24,00€
PD1	Passend für SATELEC®	1 Stück	24,00€
PM1	Passend für MECTRON®	1 Stück	24,00€

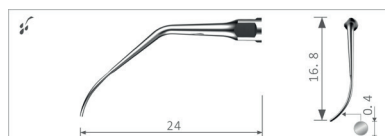


Nach links gebogen. Zur Behandlung von Furkationen, interdentalem Zahnstein und sehr engen Zahnzwischenräumen.

Art.Nr.	Passend	Anzahl	Preis
P2L	Passend für EMS®	1 Stück	30,00€
PN2L	Passend für NSK®	1 Stück	30,00€
PD2L	Passend für SATELEC®	1 Stück	30,00€

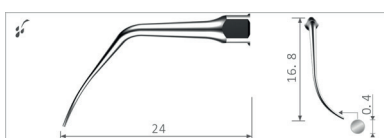


Nach rechts gebogen. Zur Behandlung von Furkationen, interdentalem Zahnstein und sehr engen Zahnzwischenräumen.

Art.Nr.	Passend	Anzahl	Preis
P2R	Passend für EMS®	1 Stück	30,00€
PN2R	Passend für NSK®	1 Stück	30,00€
PD2R	Passend für SATELEC®	1 Stück	30,00€

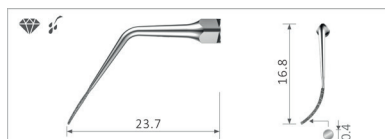


Nach links gebogen und diamantbeschichtet. Zur Behandlung von Furkationen, Zahnzwischenraum und sehr engen Räumen.

Art.Nr.	Passend	Anzahl	Preis
P2LD	Passend für EMS®	1 Stück	36,00€
PD2LD	Passend für SATELEC®	1 Stück	36,00€

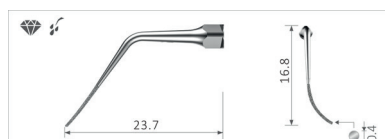


Nach rechts gebogen und diamantbeschichtet. Zur Behandlung von Furkationen, Zahnzwischenraum und sehr engen Räumen.

Art.Nr.	Passend	Anzahl	Preis
P2RD	Passend für EMS®	1 Stück	36,00€
PD2RD	Passend für SATELEC®	1 Stück	36,00€

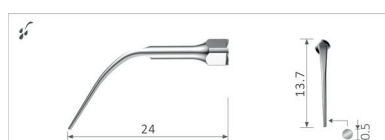


Zur Entfernung von subgingivalem Zahnstein.

Art.Nr.	Passend	Anzahl	Preis
P3	Passend für EMS®	1 Stück	24,00€
PS3	Passend für SIRONA®	1 Stück	24,00€
PN3	Passend für NSK®	1 Stück	24,00€
PD3	Passend für SATELEC®	1 Stück	24,00€
PM3	Passend für MECTRON®	1 Stück	24,00€

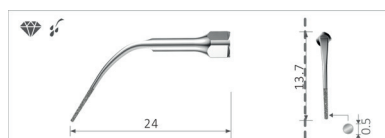





Diamantbeschichtet. Zum Glätten der Wurzeloberfläche während einer Parodontallappenoperation.

Art.Nr.	Passend	Anzahl	Preis
P3D	Passend für EMS®	1 Stück	40,00€
PS3D	Passend für SIRONA®	1 Stück	40,00€
PD3D	Passend für SATELEC®	1 Stück	40,00€

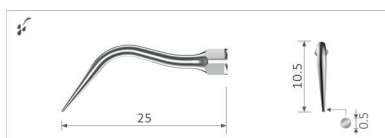

Zur Entfernung von subgingivalem Zahnstein.

Art.Nr.	Passend	Anzahl	Preis
P4	Passend für EMS®	1 Stück	24,00€
PS4	Passend für SIRONA®	1 Stück	24,00€
PN4	Passend für NSK®	1 Stück	24,00€
PD4	Passend für SATELEC®	1 Stück	24,00€

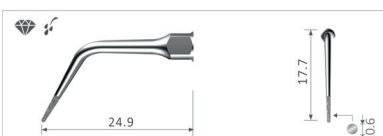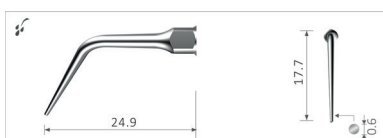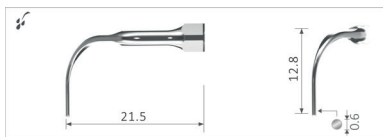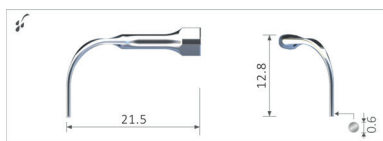

## Parodontologie

Diamantbeschichtet. Ein leistungsstarkes Instrument für die Entfernung von Verkalkungen. Diese Spitze kann zur Erweiterung der verkalkten Wurzeln im koronalen Drittel verwendet werden.

Art.Nr.	Passend	Anzahl	Preis
P4D	Passend für EMS*	1 Stück	36,00€
PN4D	Passend für NSK*	1 Stück	36,00€
PD4D	Passend für SATELEC*	1 Stück	36,00€

Anteriore Parodontologie. Ermöglicht die Behandlung des Schneidezahn- und Eckzahnblocks. Die Führungskante ist parallel zur Tasche ausgerichtet. Ermöglicht Arbeiten in der Parodontaltasche ohne Verletzung des Ligaments

Art.Nr.	Passend	Anzahl	Preis
P5 - eH3	Passend für EMS*	1 Stück	36,00€
P5 - sH3	Passend für SATELEC*	1 Stück	36,00€

Nach links gebogen. Zur Entfernung von subgingivalem Zahnstein.

Art.Nr.	Passend	Anzahl	Preis
P6L	Passend für EMS*	1 Stück	36,00€
PD6L	Passend für SATELEC*	1 Stück	36,00€

Nach rechts gebogen. Zur Entfernung von subgingivalem Zahnstein.

Art.Nr.	Passend	Anzahl	Preis
P6R	Passend für EMS*	1 Stück	36,00€
PD6R	Passend für SATELEC*	1 Stück	36,00€

## Endodontie

120°-Winkelhalter für U-Feilen mit Schaft. Durchmesser 0,57mm. Zur Wurzelkanalreinigung im Frontzahn- und Prämolarenbereich.

Art.Nr.	Passend	Anzahl	Preis
E1	Passend für EMS*	1 Stück	24,00€
ES1	Passend für SIRONA*	1 Stück	24,00€
EN1	Passend für NSK*	1 Stück	24,00€
ED1	Passend für SATELEC*	1 Stück	24,00€

95° Winkelhalter für U-Feilen mit Schaft. Durchmesser 0,57mm. Zur Wurzelkanalreinigung im Molarenbereich.

Art.Nr.	Passend	Anzahl	Preis
E2	Passend für EMS*	1 Stück	24,00€
ES2	Passend für SIRONA*	1 Stück	24,00€
EN2	Passend für NSK*	1 Stück	24,00€
ED2	Passend für SATELEC*	1 Stück	24,00€

Bei deaktiviertem Kühlspray wird diese Spitze für seitliche, thermische Kondensation von Guttaperchaspitzen verwendet.

Art.Nr.	Passend	Anzahl	Preis
E3	Passend für EMS*	1 Stück	24,00€
ES3	Passend für SIRONA*	1 Stück	24,00€
EN3	Passend für NSK*	1 Stück	24,00€
ED3	Passend für SATELEC*	1 Stück	24,00€

Diamantbeschichtet. Zur Entfernung von Verkalkungen und schlechtem Füllmaterial aus der Pulpahöhle und Pulpakammer.

Art.Nr.	Passend	Anzahl	Preis
E3D	Passend für EMS*	1 Stück	40,00€
ES3D	Passend für SIRONA*	1 Stück	40,00€
EN3D	Passend für NSK*	1 Stück	40,00€
ED3D	Passend für SATELEC*	1 Stück	40,00€

## Endodontie

Entfernt schnell Hindernisse und defekte Instrumente im mittleren und oberen Drittel großer und gerader Kanäle.



Art.Nr.	Passend	Anzahl	Preis
E4	Passend für EMS®	1 Stück	30,00€
ES4	Passend für SIRONA®	1 Stück	30,00€
EN4	Passend für NSK®	1 Stück	30,00€
ED4	Passend für SATELEC®	1 Stück	30,00€

Diamantbeschichtet. Für die Nachbehandlung oder Entfernung extrem harter Materialien.




Art.Nr.	Passend	Anzahl	Preis
E4D	Passend für EMS®	1 Stück	36,00€
ES4D	Passend für SIRONA®	1 Stück	36,00€
EN4D	Passend für NSK®	1 Stück	36,00€
ED4D	Passend für SATELEC®	1 Stück	36,00€

Nützlich für die schnelle Entfernung von Zahnstein und temporären Zementen.



Art.Nr.	Passend	Anzahl	Preis
E5	Passend für EMS®	1 Stück	30,00€
ES5	Passend für SIRONA®	1 Stück	30,00€
EN5	Passend für NSK®	1 Stück	30,00€
ED5	Passend für SATELEC®	1 Stück	30,00€

Diamantbeschichtet. Für verbessertes Schneiden und Abrieb. Besonders nützlich zum Entfernen sehr harter Materialien an der Kanalwand.

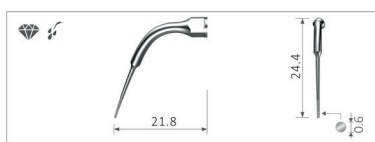

Art.Nr.	Passend	Anzahl	Preis
E5D	Passend für EMS®	1 Stück	36,00€
ES5D	Passend für SIRONA®	1 Stück	36,00€
EN5D	Passend für NSK®	1 Stück	36,00€
ED5D	Passend für SATELEC®	1 Stück	36,00€

FG-Bohrerhalter zur Erweiterung des Wurzelkanals und zum Beschleifen der Zähne.




Art.Nr.	Passend	Anzahl	Preis
E8	Passend für EMS®	1 Stück	36,00€
EN8	Passend für NSK®	1 Stück	36,00€
ED8	Passend für SATELEC®	1 Stück	36,00€

FG-Bohrerhalter zur Erweiterung des Wurzelkanals und zum Beschleifen der Zähne.




Art.Nr.	Passend	Anzahl	Preis
E9	Passend für EMS®	1 Stück	36,00€
EN9	Passend für NSK®	1 Stück	36,00€
ED9	Passend für SATELEC®	1 Stück	36,00€

Zur schonenden Behandlung des Wurzelkanals von Frontzähnen.

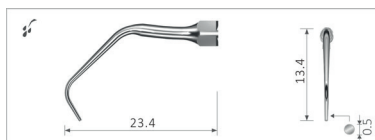

Art.Nr.	Passend	Anzahl	Preis
E10	Passend für EMS®	1 Stück	30,00€
EN10	Passend für NSK®	1 Stück	30,00€
ED10	Passend für SATELEC®	1 Stück	30,00€


Diamantbeschichtet. Zur effizienten apikalen Politur von Frontzähnen.

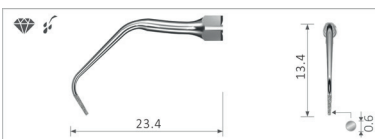


Art.Nr.	Passend	Anzahl	Preis
E10D	Passend für EMS®	1 Stück	36,00€
EN10D	Passend für NSK®	1 Stück	36,00€
ED10D	Passend für SATELEC®	1 Stück	36,00€

## Endodontie

Zur schonenden Behandlung im Wurzelkanal von Frontzähnen.

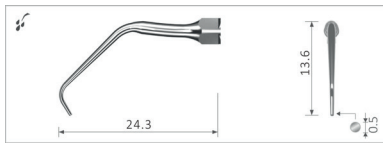

Art.Nr.	Passend	Anzahl	Preis
E11	Passend für EMS*	1 Stück	30,00€
EN11	Passend für NSK*	1 Stück	30,00€
ED11	Passend für SATELEC*	1 Stück	30,00€

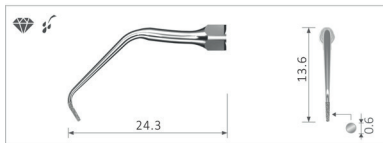

Diamantbeschichtet mit verbesserter Schneid- und Abrasionskraft. Besonders nützlich zum Entfernen sehr harter Materialien an der Kanalwand und zum seitlichen Schneiden.

Art.Nr.	Passend	Anzahl	Preis
E11D	Passend für EMS*	1 Stück	36,00€
EN11D	Passend für NSK*	1 Stück	36,00€
ED11D	Passend für SATELEC*	1 Stück	36,00€




Entfernt schnell Hindernisse und defekte Instrumente im mittleren und oberen Drittel großer und gerader Kanäle.

Art.Nr.	Passend	Anzahl	Preis
E14	Passend für EMS*	1 Stück	30,00€
EN14	Passend für NSK*	1 Stück	30,00€
ED14	Passend für SATELEC*	1 Stück	30,00€




Diamantbeschichtet für Nachbehandlungen oder Entfernung extrem harte Materialien.

Art.Nr.	Passend	Anzahl	Preis
E14D	Passend für EMS*	1 Stück	36,00€
EN14D	Passend für NSK*	1 Stück	36,00€
ED14D	Passend für SATELEC*	1 Stück	36,00€

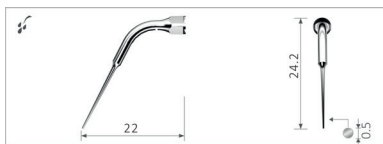

Nützlich für die schnelle Entfernung von Zahnstein und temporären Zementen.

Art.Nr.	Passend	Anzahl	Preis
E15	Passend für EMS*	1 Stück	30,00€
EN15	Passend für NSK*	1 Stück	30,00€
ED15	Passend für SATELEC*	1 Stück	30,00€

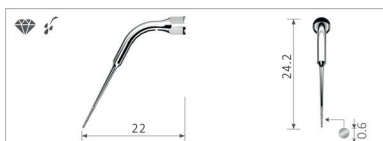


Diamantbeschichtet. Eine diamantbeschichtete Stahlspitze zur Nachbearbeitung von sehr hartem Material im mittleren Drittel. Länge 40mm, 30µm Diamanten, konisch 4%.


Art.Nr.	Passend	Anzahl	Preis
E15D	Passend für EMS*	1 Stück	36,00€
EN15D	Passend für NSK*	1 Stück	36,00€
ED15D	Passend für SATELEC*	1 Stück	36,00€

## Kronen entfernen

Zum Entfernen von Brücken, Kronen und Stiften durch Aufbrechen des Zements.

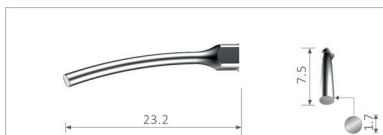

Art.Nr.	Passend	Anzahl	Preis
G7	Passend für EMS*	1 Stück	20,00€
GS7	Passend für SIRONA*	1 Stück	20,00€
GN7	Passend für NSK*	1 Stück	20,00€
GD7	Passend für SATELEC*	1 Stück	20,00€

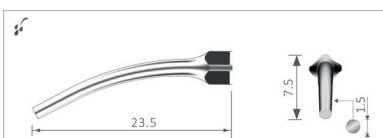


Zum Entfernen von Brücken, Kronen und Stiften durch Aufbrechen des Zements.

Art.Nr.	Passend	Anzahl	Preis
G8	Passend für EMS*	1 Stück	20,00€


## Kavitätenpräparation

Kugelförmig - diamantbeschichtet. Zur Präparation von Kauflächen und Zahnhalskanten.

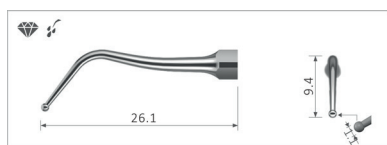


Art.Nr.	Passend	Anzahl	Preis
SB1	Passend für EMS*	1 Stück	36,00€
SBS1	Passend für SIRONA*	1 Stück	36,00€
SBN1	Passend für NSK*	1 Stück	36,00€
SBD1	Passend für SATELEC*	1 Stück	36,00€

Halbkugelförmig - diamantbeschichtet. Zum Finieren zervikaler Approximalbereiche, ohne Schäden an den Nachbarzähnen zu verursachen.

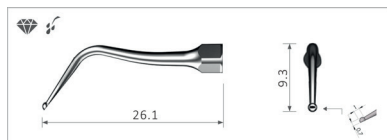


Art.Nr.	Passend	Anzahl	Preis
SB2	Passend für EMS*	1 Stück	36,00€
SBS2	Passend für SIRONA*	1 Stück	36,00€
SBN2	Passend für NSK*	1 Stück	36,00€
SBD2	Passend für SATELEC*	1 Stück	36,00€

Halbkugelförmig - diamantbeschichtet. Zum Finieren zervikaler Approximalbereiche, ohne Schäden an den Nachbarzähnen zu verursachen.

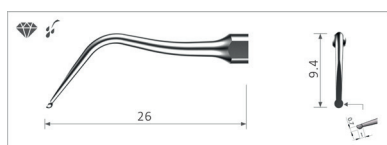

Art.Nr.	Passend	Anzahl	Preis
SB3	Passend für EMS*	1 Stück	36,00€
SBS3	Passend für SIRONA*	1 Stück	36,00€
SBN3	Passend für NSK*	1 Stück	36,00€
SBD3	Passend für SATELEC*	1 Stück	36,00€

Halbkugelförmig - diamantbeschichtet. 45° nach links versetzt. Ermöglicht kariöse Bereiche eines Zahnes zu entfernen, ohne Schäden an den Nachbarzähnen zu verursachen.

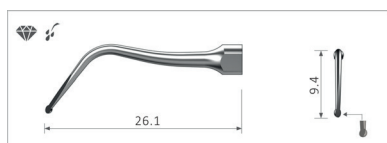

Art.Nr.	Passend	Anzahl	Preis
SBL	Passend für EMS*	1 Stück	36,00€
SBSL	Passend für SIRONA*	1 Stück	36,00€
SBNL	Passend für NSK*	1 Stück	36,00€
SBDL	Passend für SATELEC*	1 Stück	36,00€

Halbkugelförmig - diamantbeschichtet. 45° nach rechts versetzt. Ermöglicht kariöse Bereiche eines Zahnes zu entfernen, ohne Schäden an den Nachbarzähnen zu verursachen.



Art.Nr.	Passend	Anzahl	Preis
SBR	Passend für EMS*	1 Stück	36,00€
SBSR	Passend für SIRONA*	1 Stück	36,00€
SBNR	Passend für NSK*	1 Stück	36,00€
SBDR	Passend für SATELEC*	1 Stück	36,00€


## Implantatreinigung

Implantatreinigung. PEEK-Spitze zur sicheren und schonenden Reinigung von Implantaten und Restaurationen. Das ICP SET enthält 1x ICP WREN, 1x ICP und 2x Peek-Ersatzspitzen.



Art.Nr.	Passend	Anzahl	Preis
eICP SET	Passend für EMS*	1 Stück	61,00€
srICP SET	Passend für SIRONA*	1 Stück	61,00€
nICP SET	Passend für NSK*	1 Stück	61,00€
slCP SET	Passend für SATELEC*	1 Stück	61,00€
klCP SET	Passend für KaVo SONICflex*	1 Stück	61,00€
kICPA SET	Passend für KaVo PiezoLED* & PIEZOsoft*	1 Stück	61,00€
mICP SET	Passend für MECTRON*	1 Stück	61,00€

**Ersatz.** PEEK-Spitzenpackung mit 10 Stück (passen nur auf das Xpedent ICP Set)


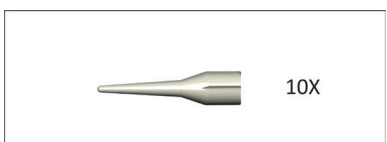


Art.Nr.	Passend	Anzahl	Preis
ICPpeek	Passend für EMS*	1 Stück	60,00€
ICPpeek	Passend für SIRONA*	1 Stück	60,00€
ICPpeek	Passend für NSK*	1 Stück	60,00€
ICPpeek	Passend für SATELEC*	1 Stück	60,00€
ICPpeek	Passend für KaVo SONICflex*	1 Stück	60,00€
ICPpeek	Passend für KaVo PiezoLED* & PIEZOsoft*	1 Stück	60,00€
ICPpeek	Passend für MECTRON*	1 Stück	60,00€

### Scaling & Parodontologie


**Universal.** Präzise Entfernung von festem supragingivalem Zahnstein in allen Quadranten.

Art.Nr.	Passend	Inhalt	Anzahl	Preis
eA	Passend für EMS®		1 Stück	31,00€
TWT ES eA	Passend für EMS®	eA + Drehmomentschlüssel	1 Set	52,00€

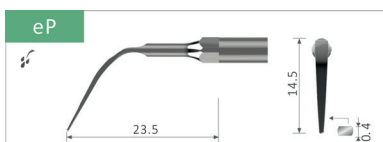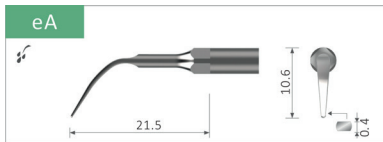


**Perio.** Das P-Instrument eignet sich gut zur präzisen Entfernung von hartnäckigem sub- und supragingivalem Zahnstein und Konkrementen in allen Quadranten.

Art.Nr.	Passend	Inhalt	Anzahl	Preis
eP	Passend für EMS®		1 Stück	31,00€
TWT ES eP	Passend für EMS®	eP + Drehmomentschlüssel	1 Set	52,00€

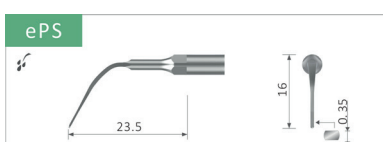


**PerioSlim.** Das schnelle und minimalinvasive PS-Instrument ist ideal für die Zahnsteinentfernung in tiefen Parodontaltaschen in allen Quadranten.

Art.Nr.	Passend	Inhalt	Anzahl	Preis
ePS	Passend für EMS®		1 Stück	31,00€
TWT ES ePS	Passend für EMS®	ePS + Drehmomentschlüssel	1 Set	52,00€

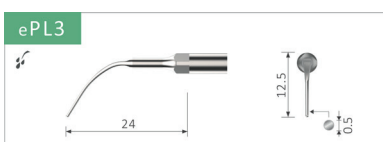


**PerioCleaning.** Zur Reinigung und Desinfektion von Parodontaltaschen. Es eignet sich besonders für Nachsorge- und Recall-Besuche von Parodontalpflegepatienten.

Art.Nr.	Passend	Inhalt	Anzahl	Preis
ePL3	Passend für EMS®		1 Stück	31,00€
TWT ES ePL3	Passend für EMS®	ePL3 + Drehmomentschlüssel	1 Set	52,00€

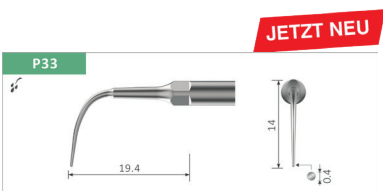

**JETZT NEU**

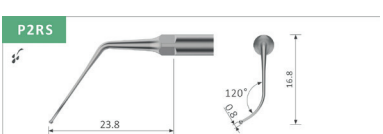

**Parodontologie.** Die Spitze ist schlank und kann für das feine Scaling der subgingivalen Wurzeloberfläche verwendet werden.

Art.Nr.	Passend	Inhalt	Anzahl	Preis
P33	Passend für EMS®		1 Stück	31,00€

**Perio.** Links gebogenes Instrument mit einer kleinen Kugel >0,8 mm Durchmesser an der Instrumentenspitze zur parodontalen Debridement von Furkationen und Konkavitäten.

Art.Nr.	Passend	Anzahl	Preis
eP2RS	Passend für EMS®	1 Stück	37,00€

**Perio.** Rechts gebogenes Instrument mit einer kleinen Kugel >0,8 mm Durchmesser an der Instrumentenspitze zur parodontalen Debridement von Furkationen und Konkavitäten.


Art.Nr.	Passend	Anzahl	Preis
eP2RS	Passend für EMS®	1 Stück	37,00€

## Endodontie



**Zugang zu langen Kanälen.** Die ROGP-Spitze wird verwendet, um auf Bereiche zuzugreifen, die von anderen Spitzen nicht erreicht werden. Besonders effektiv für Nachbehandlungen, insbesondere in langen ovalen Kanälen, wo die meisten anderen Spitzen nicht passen. Hervorragend geeignet zur Entfernung von Guttapercha.

Art.Nr.	Passend	Anzahl	Preis
eROGP	Passend für EMS*	1 Stück	61,00€

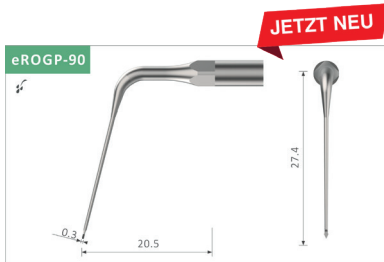

**Zugang zu langen Kanälen - 90°.** Die ROGP-Spitze wird verwendet, um auf Bereiche zuzugreifen, die von anderen Spitzen nicht erreicht werden. Besonders effektiv für Nachbehandlungen, insbesondere in langen ovalen Kanälen, wo die meisten anderen Spitzen nicht passen. Hervorragend geeignet zur Entfernung von Guttapercha.


Art.Nr.	Passend	Anzahl	Preis
eROGP-90	Passend für EMS*	1 Stück	61,00€




## Passende Spitzen für Satelec® Scaler Geräte

### Scaling

**Universal.** Einfache supragingivale Zahnsteinentfernung ohne Beschädigung des Schmelzes.

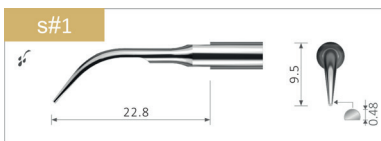

Art.Nr.	Passend	Anzahl	Preis
s#1	Passend für Satelec*	1 Stück	31,00€

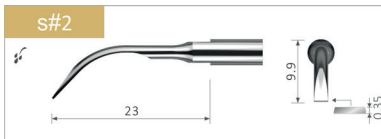


**Flache Kante zum Scaling.** Supragingivale Zahnsteinentfernung schwerer Konkreme.

Art.Nr.	Passend	Anzahl	Preis
s#2	Passend für Satelec*	1 Stück	31,00€




**Fleckenentfernung.** Abgerundete Vorderkante ist effektiv zum Entfernen von Flecken oder Ablagerungen wie Tabak oder Tee.

Art.Nr.	Passend	Anzahl	Preis
s#3	Passend für Satelec*	1 Stück	31,00€

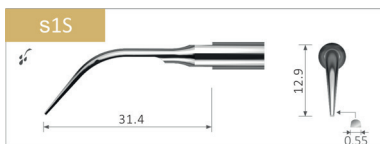

**Slim.** Supra- und subgingivale Zahnsteinentfernung. Besonders wirksam für Approximalräume.


Art.Nr.	Passend	Anzahl	Preis
s1S	Passend für Satelec*	1 Stück	31,00€

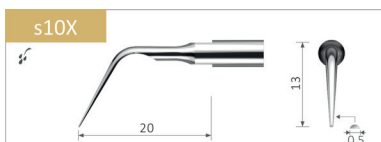

### Parodontologie

**Interproximal.** Durch seinen flachen aktiven Teil, eignet sich die Spitze besonders für die Approximalräume und die supragingivale Zahnsteinentfernung. Ihr anatomisches Design ermöglicht eine schnelle und effiziente Anwendung.

Art.Nr.	Passend	Anzahl	Preis
s10X	Passend für Satelec*	1 Stück	37,00€

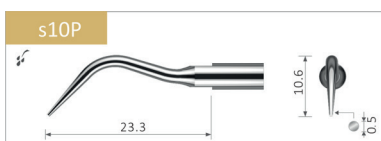

**Flacher Bogen.** Dünne runde Spitze für das Scaling flacher Taschen (Tiefe <2-3mm).


Art.Nr.	Passend	Anzahl	Preis
s10P	Passend für Satelec*	1 Stück	37,00€



### Parodontologie


**Subgingival.** Mittlere Taschen (<4mm). Entfernung von Biofilm und weichen Ablagerungen. Ermöglicht die Beobachtung der Taschentiefe mit Hilfe der 3mm-Skala.

Art.Nr.	Passend	Anzahl	Preis
s10Z	Passend für Satelec®	1 Stück	37,00€

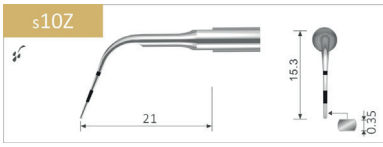

**Anteriore Parodontologie.** Ermöglicht die Behandlung des Schneidezahn- und Eckzahnblocks. Die Führungskante ist parallel zur Tasche ausgerichtet. Ermöglicht Arbeiten in der Parodontaltasche ohne Verletzung des Ligaments.

Art.Nr.	Passend	Anzahl	Preis
sH3	Passend für Satelec®	1 Stück	37,00€

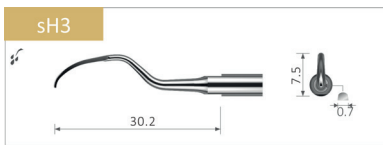


**Prämolar und Molar:** Linkskurve. Erstes Instrument zur Behandlung aller Oberflächen und Furkationen.

**Oberkieferknochen:** Bukkale und distale Flächen vom zweiten Quadranten, Drehpunkt bei 13, dann die palatinal und mesialen Flächen vom ersten Quadranten.

**Unterkieferknochen:** Bukkale und distale Flächen vom vierten Quadranten, Drehpunkt bei 43, dann linguale und mesiale Flächen vom dritten Quadranten.

Art.Nr.	Passend	Anzahl	Preis
sH4L	Passend für Satelec®	1 Stück	37,00€

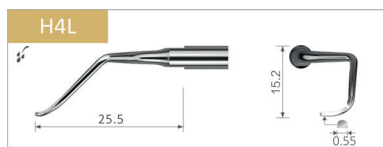

**Prämolar und Molar:** Rechtskurve. Zweites Instrument, Verwendung nach H4L

**Oberkieferknochen:** Palatinale und mesiale Flächen vom zweiten Quadranten, Drehpunkt bei 13, dann bukkale und distale Flächen vom ersten Quadranten.


**Unterkieferknochen:** Linguale und mesiale Flächen vom vierten Quadranten, Drehpunkt bei 43, dann bukkale und distale Flächen vom dritten Quadranten.

Art.Nr.	Passend	Anzahl	Preis
sH4R	Passend für Satelec®	1 Stück	37,00€




**Erweiterte Sonde.** Ideal zur Untersuchung und Pflege von mittleren bis tiefen Taschen (>4mm). Eine Diagnosehilfe für das Débridement und die Spülung von Taschen.

Art.Nr.	Passend	Anzahl	Preis
sTK1L	Passend für Satelec®	1 Stück	37,00€

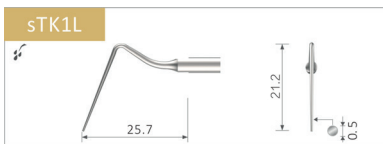


**Sonde.** Empfohlen zur Untersuchung flacher und mittlerer Taschen (< 4mm) und zur Pflege einfacher Taschen. Die sTK1S-Spitze ist alle 3mm graduiert.

Art.Nr.	Passend	Anzahl	Preis
sTK1S	Passend für Satelec®	1 Stück	37,00€

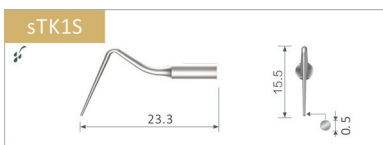


**Pflegesonde linksorientiert.** Empfohlen für die Pflege von mittleren bis tiefen Taschen und Furkationen. Äquivalent zur Nabers-Sonde.

Art.Nr.	Passend	Anzahl	Preis
sTK2L	Passend für Satelec®	1 Stück	37,00€

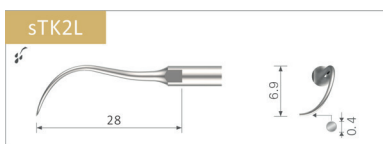


**Pflegesonde rechtsorientiert.** Empfohlen für die Pflege von mittleren bis tiefen Taschen und Furkationen. Äquivalent zur Nabers-Sonde.

Art.Nr.	Passend	Anzahl	Preis
sTK2R	Passend für Satelec®	1 Stück	37,00€

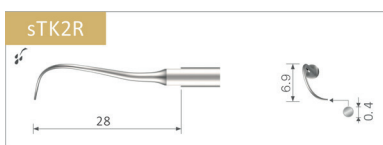



**JETZT NEU**

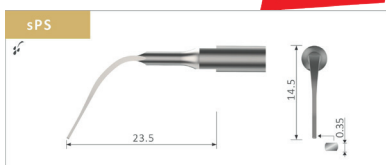

## Passende Spitzen für Satelec® Scaler Geräte

**PerioSlim.** Minimalinvasiv. Für die Zahnsteinentfernung in tiefen Parodontaltaschen in allen Quadranten.

Art.Nr.	Passend	Anzahl	Preis
sPS	Passend für Satelec®	1 Stück	31,00€

**JETZT NEU**



## Endodontie

**Entfernung von Instrumenten.** Im mittleren Drittel breiter, gerader Kanäle eingesetzt, ist die sET40 eine schnelle Lösung zur Entfernung von abgebrochenen Instrumenten.

Art.Nr.	Passend	Anzahl	Preis
sET40	Passend für Satelec®	1 Stück	37,00€

**JETZT NEU**



**Diamantbeschichtet.** Eine diamantbeschichtete Stahlspitze zur Nachbehandlung von sehr hartem Material im mittleren Drittel. Länge 40mm, 30µm Diamanten, konisch 4%.

Art.Nr.	Passend	Anzahl	Preis
sET40D	Passend für Satelec®	1 Stück	47,00€

**JETZT NEU**



**Zugang zu langen Kanälen.** Die sROGP-Spitze wird verwendet, um auf Bereiche zuzugreifen, die von anderen Spitzen nicht erreicht werden können. Besonders effektiv für Nachbehandlungen, insbesondere in langen ovalen Kanälen, in welche die meisten anderen Spitzen nicht passen. Hervorragend geeignet zur Entfernung von Guttapercha.

Art.Nr.	Passend	Anzahl	Preis
sROGP	Passend für Satelec®	1 Stück	61,00€

**JETZT NEU**



**Zugang zu langen Kanälen - 90°.** Die sROGP-Spitze wird verwendet, um auf Bereiche zuzugreifen, die von anderen Spitzen nicht erreicht werden können. Besonders effektiv für Nachbehandlungen, insbesondere in langen ovalen Kanälen, in welche die meisten anderen Spitzen nicht passen. Hervorragend geeignet zur Entfernung von Guttapercha.

Art.Nr.	Passend	Anzahl	Preis
sROGP-90	Passend für Satelec®	1 Stück	61,00€


**JETZT NEU**



**Revision lang.** Wird im apikalen Drittel und in langen geraden Kanälen zur Nachbehandlung verwendet, Niob-Titan (NbTi), Länge 25mm, konisch 3%.

Art.Nr.	Passend	Anzahl	Preis
sET25L	Passend für Satelec®	1 Stück	47,00€

**JETZT NEU**

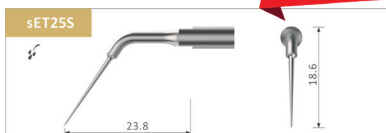

**Revision kurz.** Wird im koronalen Drittel und den Isthmen verwendet, Niob-Titan (NbTi), Länge 15mm, konisch 4%.

Art.Nr.	Passend	Anzahl	Preis
sET25S	Passend für Satelec®	1 Stück	47,00€

**JETZT NEU**



**Revision.** Bevorzugt im mittleren und apikalen Drittel zur Nachbehandlung und Extraktion abgebrochener Instrumente einzusetzen, Niob-Titan (NbTi), Länge 20mm, konisch 3%.

Art.Nr.	Passend	Anzahl	Preis
sET25	Passend für Satelec®	1 Stück	47,00€

### Endodontie

**Revision - diamantbeschichtet.** Dieser ZEG Ansatz wird im ersten koronalen Drittel angewendet, um sehr harte Materialien zu entfernen. Länge 20mm, 30µm Diamanten, konisch 5%.

Art.Nr.	Passend	Anzahl	Preis
sET20D	Passend für Satelec®	1 Stück	47,00€

**Lokalisieren von Verkalkungen.** Wird für die Lokalisierung von Verkalkungen und Kanälen verwendet. Kugelförmig - diamantbeschichtet. Länge 20mm, konisch 5%.

Art.Nr.	Passend	Anzahl	Preis
sETBD	Passend für Satelec®	1 Stück	37,00€

### Retrograde-Chirurgie

**Retrograde-Chirurgie links.** Zur Präparation von Prämolaren- und Molarenkanälen, Länge 5mm, Diamanten 30µm, konisch 7%.

Art.Nr.	Passend	Anzahl	Preis
sP15LD	Passend für Satelec®	1 Stück	47,00€

**Retrograde-Chirurgie rechts.** Zur Präparation von Prämolaren- und Molarenkanälen, Länge 5mm, Diamanten 30µm, konisch 7%.

Art.Nr.	Passend	Anzahl	Preis
sP15RD	Passend für Satelec®	1 Stück	47,00€

**Retrograde-Chirurgie links.** Wird mit niedrigem Druck für die apikale Chirurgie von Molaren und Prämolaren verwendet, Länge 3mm, Diamanten 30µm, konisch 10%.







Art.Nr.	Passend	Anzahl	Preis
sASLD	Passend für Satelec®	1 Stück	47,00€

**Retrograde-Chirurgie rechts.** Wird mit geringem Druck für apikale Chirurgie der Molaren und Premolaren verwendet. Länge 3mm, Diamanten 30µm, konisch 10%.

Art.Nr.	Passend	Anzahl	Preis
sASRD	Passend für Satelec®	1 Stück	47,00€

**Retrograde-Chirurgie universal.** Wird mit geringer Kraft und niedrigem Druck für apikale Chirurgie der Frontzähne verwendet. Länge 3mm, Diamanten 30µm, konisch 9%.


Art.Nr.	Passend	Anzahl	Preis
sAS3D	Passend für Satelec®	1 Stück	47,00€

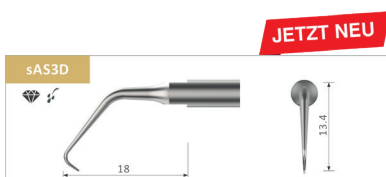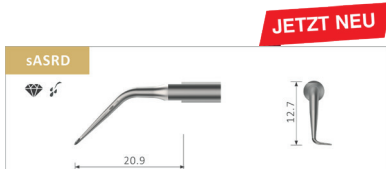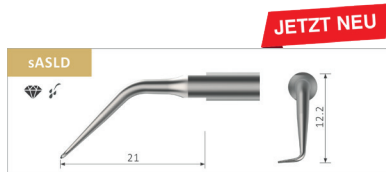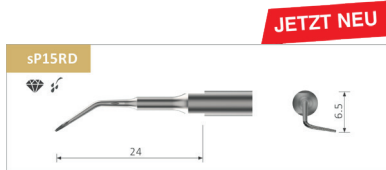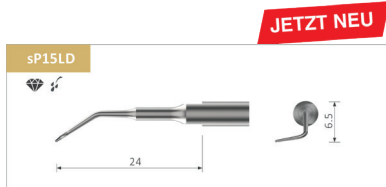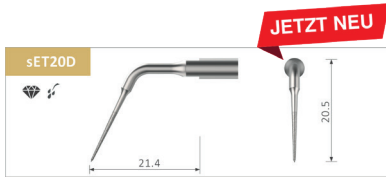

### Passend für Luftscaling (TI-MAX)


**Universal.** Entfernung von marginaler Gingiva und supragingivalem Zahnstein.

Art.Nr.	Passend	Anzahl	Preis
nS1	Passend für NSK®	1 Stück	37,00€

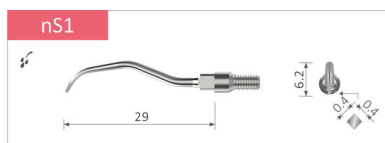


**Perio.** Entfernung von supragingivalem Zahnstein.

Art.Nr.	Passend	Anzahl	Preis
nS2	Passend für NSK®	1 Stück	37,00€

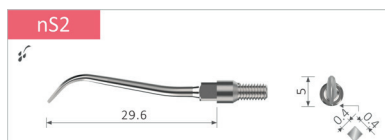


**Sichel.** Entfernung von supragingivalem Zahnstein.

Art.Nr.	Passend	Anzahl	Preis
nS3	Passend für NSK®	1 Stück	37,00€

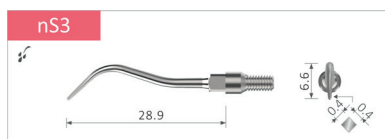


**Wurzelhobel.** Lange gerade Spitze zur Entfernung von subgingivalem Zahnstein und Biofilm.

Art.Nr.	Passend	Anzahl	Preis
nS20	Passend für NSK®	1 Stück	37,00€

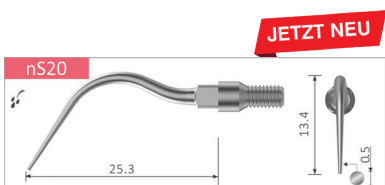


**Universal.** Schlanke Spitze.

Art.Nr.	Passend	Anzahl	Preis
NK4	Passend für NSK®	1 Stück	37,00€

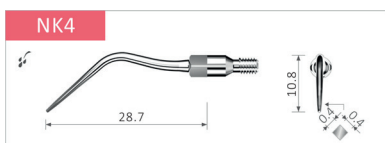


**Wurzelreinigung.** Gerade Anwendung.

Art.Nr.	Passend	Anzahl	Preis
NK5	Passend für NSK®	1 Stück	37,00€

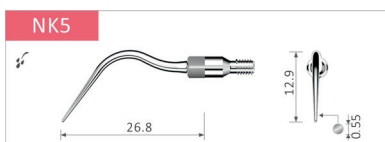


**Wurzelreinigung.** Links gebogen.

Art.Nr.	Passend	Anzahl	Preis
NK6	Passend für NSK®	1 Stück	37,00€

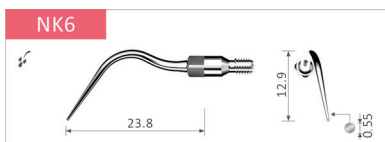

**Wurzelreinigung.** Rechts gebogen.

Art.Nr.	Passend	Anzahl	Preis
NK7	Passend für NSK®	1 Stück	37,00€

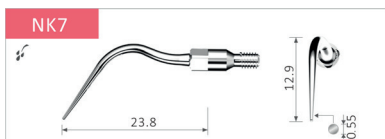


## Passende Spitzen für NSK® Scaler Geräte

### Passend für Piezo Scaling (VARIOS)


**Universal.** Entfernung von supragingivalem und marginalem Zahnstein, Entfernung von Zahnstein aus engen Interdentalbereichen.

Art.Nr.	Passend	Anzahl	Preis
nG1	Passend für NSK®	1 Stück	30,00€

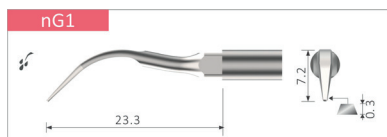


**Scaling.** Entfernung von supragingivalem und marginalem Zahnstein.

Art.Nr.	Passend	Anzahl	Preis
nG4	Passend für NSK®	1 Stück	30,00€

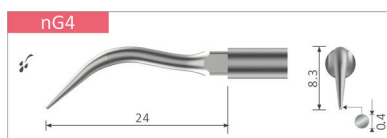


**Schlank.** Entfernung von supragingivalem und marginalem gingivalem Zahnstein und Entfernung von Zahnstein aus den Approximalräumen.

Art.Nr.	Passend	Anzahl	Preis
nG6	Passend für NSK®	1 Stück	30,00€

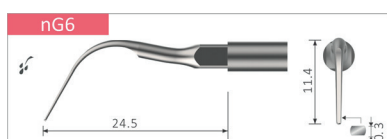


**Universal schlank.** Entfernung von supragingivalem und marginalem Zahnstein; besonders effektiv in Zahnzwischenräumen.

Art.Nr.	Passend	Anzahl	Preis
nG8	Passend für NSK®	1 Stück	30,00€

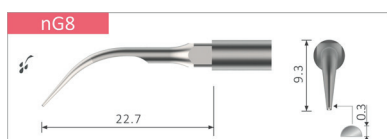

**Interdental.** Entfernung von Zahnstein aus interdentalen Bereichen.

Art.Nr.	Passend	Anzahl	Preis
nG16	Passend für NSK®	1 Stück	30,00€

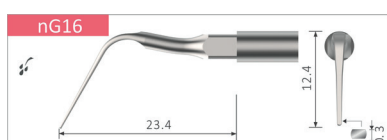


## Passende Spitzen für Sirona® Scaler Geräte

### Scaling


**General.** Ein Instrument mit flacher Spitze für das anfängliche linguale und bukkale Scaling.

Art.Nr.	Passend	Anzahl	Preis
sr1L	Passend für Sirona®	1 Stück	31,00€

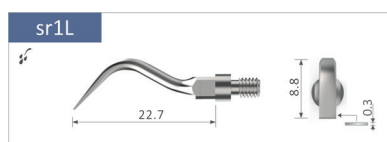


**Vielseitig.** Ein vielseitiges Instrument zum lingualen, bukkalen und approximalen Scaling.

Art.Nr.	Passend	Anzahl	Preis
sr2L	Passend für Sirona®	1 Stück	31,00€

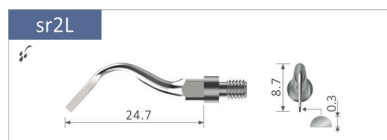

**Interdental.** Ein universelles Instrument, das zum subgingivalen Scaling an Interdentalstellen verwendet werden kann.


Art.Nr.	Passend	Anzahl	Preis
sr3L	Passend für Sirona®	1 Stück	31,00€

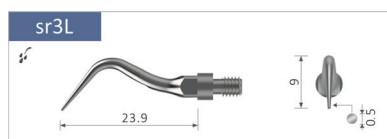

## Passende Spitzen für Sirona® Scaler Geräte


### Scaling

**Universal.** Ein feines Instrument, ideal für supragingivale und subgingivale Zahnoberflächen und Interdentalbereiche.

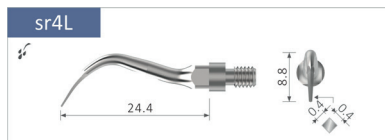


Art.Nr.	Passend	Anzahl	Preis
sr4L	Passend für Sirona®	1 Stück	31,00€

**Perio.** Zum Spülen und Wurzelreinigen in tiefen Zahnfleischtaschen.

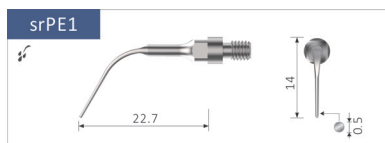


Art.Nr.	Passend	Anzahl	Preis
srPE1	Passend für Sirona®	1 Stück	31,00€

**Perio.** Rechts gebogen. Zur Wurzelreinigung bei tiefen Zahnfleischtaschen im Seitenzahnbereich.

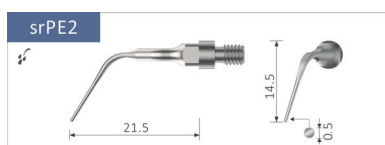

Art.Nr.	Passend	Anzahl	Preis
srPE2	Passend für Sirona®	1 Stück	31,00€

**Perio.** Links gebogen. Zur Wurzelreinigung bei tiefen Zahnfleischtaschen im Seitenzahnbereich.

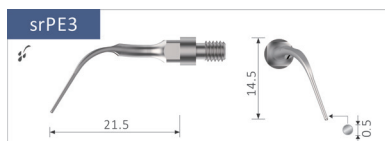


Art.Nr.	Passend	Anzahl	Preis
srPE3	Passend für Sirona®	1 Stück	31,00€

## Passende Spitzen für KaVo® Scaler Geräte


### Passend für SONICflex®

**Universal.** Zur Zahnsteinentfernung von allen Zahnoberflächen.

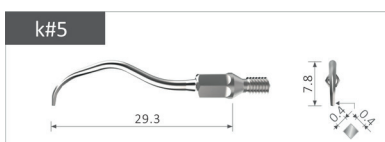


Art.Nr.	Passend	Anzahl	Preis
k#5	Passend für KaVo® SONICflex®	1 Stück	37,00€

**Fein.** Feines Instrument für kleinere und schwer zugängliche Bereiche.

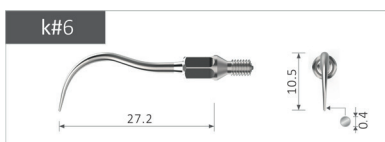


Art.Nr.	Passend	Anzahl	Preis
k#6	Passend für KaVo® SONICflex®	1 Stück	37,00€

**Subgingival.** Instrument zum subgingivalem Scaling.

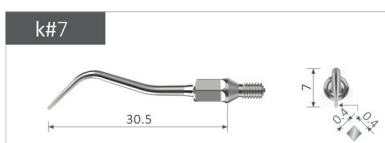

Art.Nr.	Passend	Anzahl	Preis
k#7	Passend für KaVo® SONICflex®	1 Stück	37,00€

**Subgingival.** Zur Entfernung von subgingivalem Zahnstein.

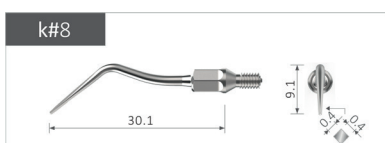

Art.Nr.	Passend	Anzahl	Preis
k#8	Passend für KaVo® SONICflex®	1 Stück	37,00€

## Passend für SONICflex®

**Perio.** Die k#60 ist eine lange, gerade Spitze mit abgerundeten Flächen und wird zur sanften Taschenreinigung während der Parodontalbehandlung verwendet. Sie reinigt effektiv in Taschen bis zu 9mm Tiefe. Wird im Frontzahnbereich, auf glatten Oberflächen verwendet.

Art.Nr.	Passend	Anzahl	Preis
k#60 (GK5)	Passend für KaVo® SONICflex®	1 Stück	37,00€

**Perio links.** Nach links gebogen, für den bukkalen Zugang im ersten und dritten Quadranten zum mittleren Schneidezahn. Sanfte aber effektive Reinigung in Taschen bis 9mm Tiefe, anschließend Frontzahnreinigung. Lingualer Zugang zu Prämolaren und Molaren im zweiten und vierten Quadranten.

Art.Nr.	Passend	Anzahl	Preis
k#61	Passend für KaVo® SONICflex®	1 Stück	37,00€

**Perio rechts.** Nach rechts gebogen, für bukkalen Zugang im zweiten und vierten Quadranten zum mittleren Schneidezahn. Sanfte aber effektive Reinigung bei Taschen bis 9mm Tiefe, anschließend Frontzahnreinigung. Lingualer Zugang zu Prämolaren und Molaren im ersten und dritten Quadranten.

Art.Nr.	Passend	Anzahl	Preis
k#62	Passend für KaVo® SONICflex®	1 Stück	37,00€

**Perio.** Diamantierte Endo Spitze in Knospenform zum Auffinden und Aufbereiten der Wurzelkanäle.

Art.Nr.	Passend	Anzahl	Preis
k#66	Passend für KaVo® SONICflex®	1 Stück	51,00€

**Perio. Diamantierte** Endo Spitze in Konischer-Form zum Auffinden und Aufbereiten der Wurzelkanäle.

Art.Nr.	Passend	Anzahl	Preis
k#67	Passend für KaVo® SONICflex®	1 Stück	51,00€

**Endo.** Diamantierte Endo Spitze in konischer-Form 112° zum Auffinden und Aufbereiten der Wurzelkanäle.






Art.Nr.	Passend	Anzahl	Preis
k#68	Passend für KaVo® SONICflex®	1 Stück	51,00€

**Endo.** Diamantierte Endo Spitze in kleiner Knospenform zum Auffinden und Aufbereiten der Wurzelkanäle.


Art.Nr.	Passend	Anzahl	Preis
k#69	Passend für KaVo® SONICflex®	1 Stück	51,00€

**Endo.** Diamantierte Endo Spitze in Konischer-Form 117° zum Auffinden und Aufbereiten der Wurzelkanäle.

Art.Nr.	Passend	Anzahl	Preis
k#70	Passend für KaVo® SONICflex®	1 Stück	51,00€

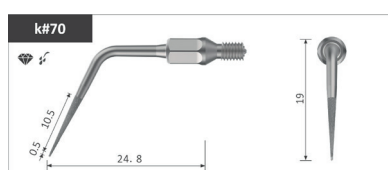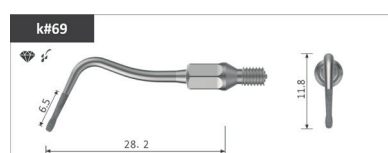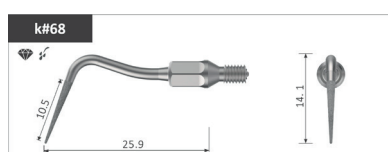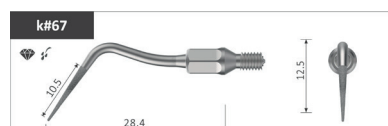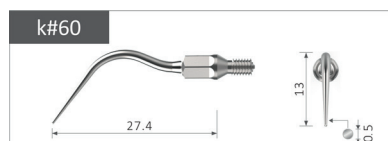


## Passende Spitzen für KaVo® Scaler Geräte

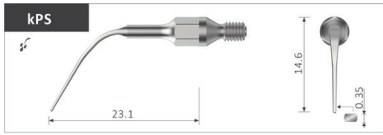


**PerioSlim.** Das schnelle und minimalinvasive PS-Instrument ist ideal für die Zahnsteinentfernung in tiefen Parodontaltaschen in allen Quadranten.

Art.Nr.	Passend	Anzahl	Preis
kPS	Passend für KaVo® SONICflex®	1 Stück	37,00€

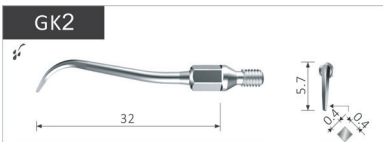


**Zahnsteinentfernung.** Zur supragingivalen, subgingivalen und interdentalen Zahnsteinentfernung.

Art.Nr.	Passend	Anzahl	Preis
GK2	Passend für KaVo® SONICflex®	1 Stück	37,00€

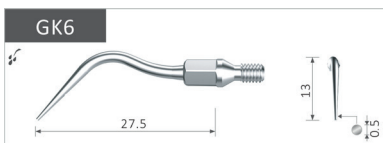


**Zahnsteinentfernung links.** Zur supragingivalen, subgingivalen und interdentalen Zahnsteinentfernung.

Art.Nr.	Passend	Anzahl	Preis
GK6	Passend für KaVo® SONICflex®	1 Stück	37,00€

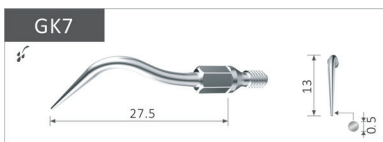

**Zahnsteinentfernung rechts.** Zur supragingivalen, subgingivalen und interdentalen Zahnsteinentfernung.


Art.Nr.	Passend	Anzahl	Preis
GK7	Passend für KaVo® SONICflex®	1 Stück	37,00€

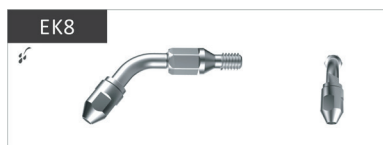

**FG-Bohrerhalter.** Zur Erweiterung des Wurzelkanals.

Art.Nr.	Passend	Anzahl	Preis
EK8	Passend für KaVo® SONICflex®	1 Stück	37,00€


## Passende Spitzen für SONICflex® & Komet® Sonicline® chirurgie

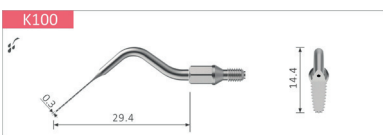

**Chirurgische Spitze.** Minimalinvasive Chirurgie - Sagittal.

Wird für Zahnablösung und -extraktion, feine Knochenschnitte und Alveolarkammsspaltung verwendet. Einfach zu handhaben und schonend für Weichgewebe. Schnitttiefe von 10,7 mm


Art.Nr.	Passend	Anzahl	Preis
K100	Passend für KaVo® SONICflex® & Komet® Sonicline®	1 Stück	92,00€

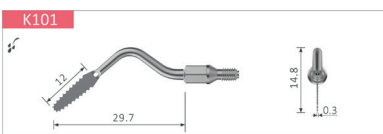

**Chirurgische Spitze.** Axial.

Wird für Zahnablösung und -extraktion, feine Knochenschnitte und Alveolarkammsspaltung verwendet. Einfach zu handhaben und schonend für Weichgewebe. Schnitttiefe von 10,7 mm

Art.Nr.	Passend	Anzahl	Preis
K101	Passend für KaVo® SONICflex® & Komet® Sonicline®	1 Stück	92,00€

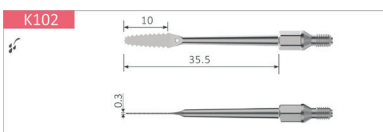

**Chirurgische Spitze.** Gerade.

Wird für Zahnablösung und -extraktion, feine Knochenschnitte und Alveolarkammsspaltung verwendet. Einfach zu handhaben und schonend für Weichgewebe. Schnitttiefe von 10,7 mm


Art.Nr.	Passend	Anzahl	Preis
K102	Passend für KaVo® SONICflex® & Komet® Sonicline®	1 Stück	92,00€



## Passende Spitzen für KaVo® Scaler Geräte

### Passend für PIEZOlux® & SONOsoft®

**Sichel.** Zur Entfernung von Zahnstein und Plaque von supragingivalem Interdentalräume.

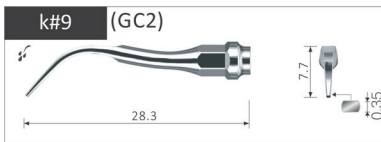


Art.Nr.	Passend	Anzahl	Preis
k#9	Passend für KaVo® PIEZOlux® & SONOsoft®	1 Stück	37,00€

**Perio.** Zur Entfernung von Zahnstein und Plaque von supragingivalem Interdentalräume.



Art.Nr.	Passend	Anzahl	Preis
k#10	Passend für KaVo® PIEZOlux® & SONOsoft®	1 Stück	37,00€


**Universal.** Zur Entfernung von subgingivalem Zahnstein.

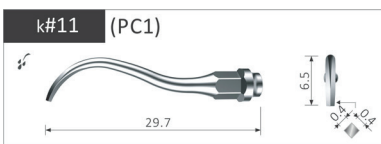

Art.Nr.	Passend	Anzahl	Preis
k#11	Passend für KaVo® PIEZOlux® & SONOsoft®	1 Stück	37,00€


### Passend für PiezoLED® & PIEZOsoft®

**Universal.** Präzise Entfernung von solidem supragingivalem Zahnstein in allen Quadranten.

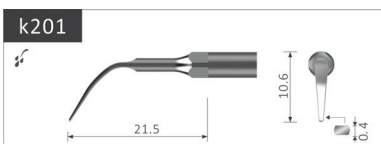


Art.Nr.	Passend	Anzahl	Preis
k201	Passend für KaVo® PiezoLED® & PIEZOsoft®	1 Stück	37,00€

**Perio.** Das Piezo-Instrument eignet sich gut zur präzisen Entfernung von hartnäckigem sub- und supragingivalem Zahnstein und Konkrementen in allen Quadranten.

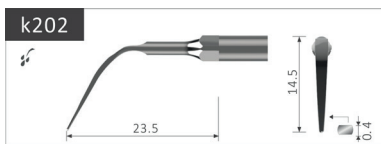

Art.Nr.	Passend	Anzahl	Preis
k202	Passend für KaVo® PiezoLED® & PIEZOsoft®	1 Stück	37,00€

**PerioSlim.** Schnell und minimalinvasiv, ideal für Zahnstein in tiefen Parodontaltaschen in allen Quadranten.

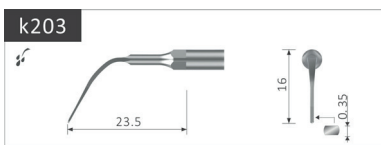

Art.Nr.	Passend	Anzahl	Preis
k203	Passend für KaVo® PiezoLED® & PIEZOsoft®	1 Stück	37,00€

**Feilenhalter 120°.** Verwendung mit Xpedent U-Feilen mit einem Schaftdurchmesser von 0,57mm. Wird normalerweise zur Reinigung des vorderen Wurzelkanals verwendet.




Art.Nr.	Passend	Anzahl	Preis
k222	Passend für KaVo® PiezoLED® & PIEZOsoft®	1 Stück	37,00€




### Passend für SONICflex quick® 2008

**Universal.** Zur Zahnsteinentfernung von allen Zahnoberflächen.

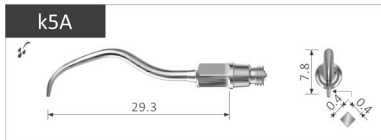


Art.Nr.	Passend	Anzahl	Preis
k5A	Passend für KaVo® SONICflex quick® 2008	1 Stück	37,00€

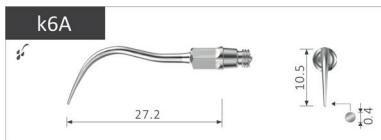


**Fein.** Feines Instrument für kleinere und schwer zugängliche Bereiche.

Art.Nr.	Passend	Anzahl	Preis
k6A	Passend für KaVo® SONICflex quick® 2008	1 Stück	37,00€

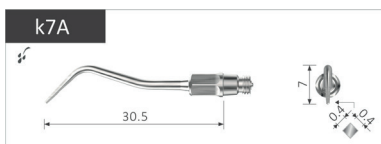


**Subgingival.** Instrument zum subgingivalen Scaling.

Art.Nr.	Passend	Anzahl	Preis
k7A	Passend für KaVo® SONICflex quick® 2008	1 Stück	37,00€

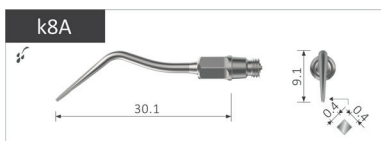


**Subgingival.** Zur Entfernung von subgingivalem Zahnstein.

Art.Nr.	Passend	Anzahl	Preis
k8A	Passend für KaVo® SONICflex quick® 2008	1 Stück	37,00€

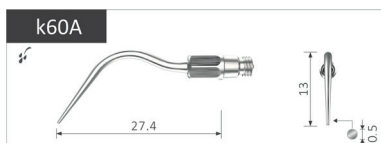


**Perio.** Lange, gerade Spitze mit abgerundeten Oberflächen. Wird zur sanften Taschenreinigung während der Parodontalbehandlung verwendet. Reinigt effektiv in Taschen bis zu 9mm Tiefe und wird im Frontzahnbereich bei glatten Oberflächen verwendet.

Art.Nr.	Passend	Anzahl	Preis
k60A (GK5A)	Passend für KaVo® SONICflex quick® 2008	1 Stück	37,00€

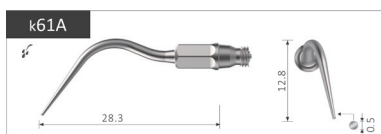

**Perio links.** Nach links gebogen, für bukkalen Zugang im ersten und dritten Quadranten zum mittleren Schneidezahn. Sanfte aber effektive Reinigung bei Taschen bis 9mm Tiefe, anschließend Frontzahnreinigung. Lingualer Zugang zu Prämolaren und Molaren im zweiten und vierten Quadranten.

Art.Nr.	Passend	Anzahl	Preis
k61A	Passend für KaVo® SONICflex quick® 2008	1 Stück	37,00€

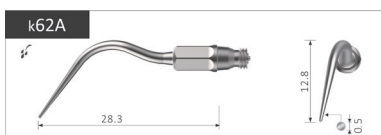

**Perio rechts.** Nach rechts gebogen, für bukkalen Zugang im zweiten und vierten Quadranten zum mittleren Schneidezahn. Sanfte aber effektive Reinigung bei Taschen bis 9mm Tiefe, anschließend Frontzahnreinigung. Lingualer Zugang zu Prämolaren und Molaren im ersten und dritten Quadranten.

Art.Nr.	Passend	Anzahl	Preis
k62A	Passend für KaVo® SONICflex quick® 2008	1 Stück	37,00€

## Passende Spitzen für KaVo® Scaler Geräte

### Passend für SONICflex quick® 2008

**Endo.** Diamantierte Endo Spitze in Knospenform zum Auffinden & Aufbereiten der Wurzelkanäle.

Art.Nr.	Passend	Anzahl	Preis
k66A	Passend für KaVo® SONICflex quick® 2008	1 Stück	51,00€

**Endo.** Diamantierte Endo Spitze in Konischer-Form zum Auffinden und Aufbereiten der Wurzelkanäle.

Art.Nr.	Passend	Anzahl	Preis
k67A	Passend für KaVo® SONICflex quick® 2008	1 Stück	51,00€

**Endo.** Diamantierte Endo Spitze in konischer-Form 112° zum Auffinden und Aufbereiten der Wurzelkanäle.






Art.Nr.	Passend	Anzahl	Preis
k68A	Passend für KaVo® SONICflex quick® 2008	1 Stück	51,00€

**Endo.** Diamantierte Endo Spitze in kleiner Knospenform zum Auffinden und Aufbereiten der Wurzelkanäle.

Art.Nr.	Passend	Anzahl	Preis
k69A	Passend für KaVo® SONICflex quick® 2008	1 Stück	51,00€

**Endo.** Diamantierte Endo Spitze in Konischer-Form 117° zum Auffinden und Aufbereiten der Wurzelkanäle.


Art.Nr.	Passend	Anzahl	Preis
k70A	Passend für KaVo® SONICflex quick® 2008	1 Stück	51,00€

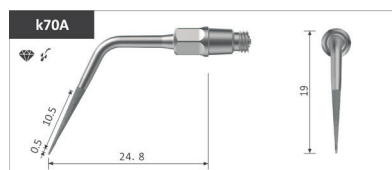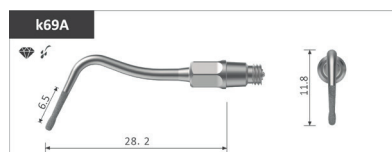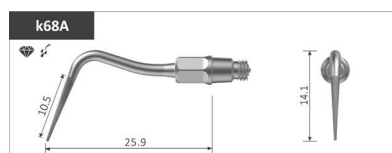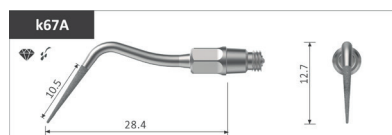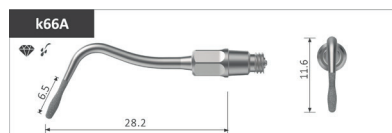

### Knochensägen


**Knochensäge (5 scharfe Zähne).** Osteotomie großer Knochenabschnitte während der Kiefer- und Gesichtschirurgie.

Art.Nr.	Passend	Anzahl	Preis
US1	Passend für MECTRON®	1 Stück	60,00€

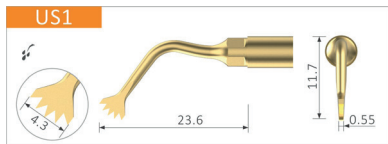


**Links gewinkelte Mikrosäge 0,6mm.** Für alle Osteotomietechniken im Ober- und Unterkiefer, Knochenblocktransplantation und horizontale Osteotomie.

Art.Nr.	Passend	Anzahl	Preis
US1L	Passend für MECTRON®	1 Stück	70,00€

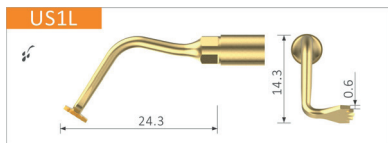


**Rechts gewinkelte Mikrosäge 0,6mm.** Für alle Osteotomietechniken im Ober- und Unterkiefer, Knochenblocktransplantation und horizontale Osteotomie.

Art.Nr.	Passend	Anzahl	Preis
US1R	Passend für MECTRON®	1 Stück	70,00€

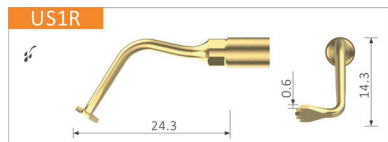


**Präzisionssäge (5 scharfe Zähne).** Zum Schneiden von Knochen mit großer Präzision und Effizienz.

Art.Nr.	Passend	Anzahl	Preis
US2	Passend für MECTRON®	1 Stück	90,00€

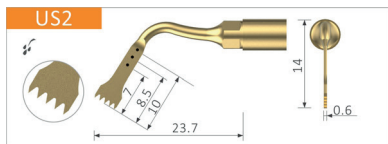


**Präzisionssäge (4 scharfe Zähne).** Zum Schneiden von Knochen mit großer Präzision und Effizienz.

Art.Nr.	Passend	Anzahl	Preis
US2-2	Passend für MECTRON®	1 Stück	90,00€

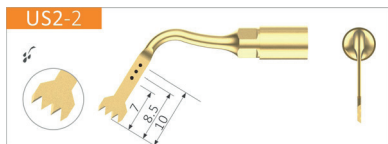


**Sägezahn.** Zum Schneiden von Knochen mit großer Präzision und Effizienz.

Art.Nr.	Passend	Anzahl	Preis
US2B	Passend für MECTRON®	1 Stück	90,00€

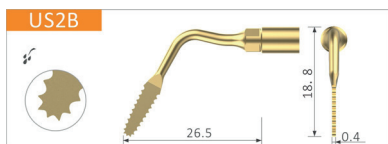


**Einfaches-Skalpell.** Osteotom mit hoher Präzision in anatomisch dünnen Strukturen (z.B. Kieferkammerweiterung, interdentale Kortikotomien, nicht traumatischer Nasendornfortsatz).

Art.Nr.	Passend	Anzahl	Preis
US3	Passend für MECTRON®	1 Stück	90,00€

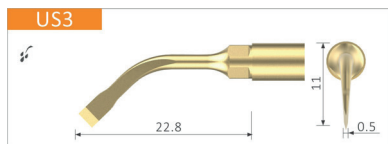


**Osteoplastik-Skalpell.** Universelle Osteoplastik, parodontale Osteotomie, Kronenverlängerung, Entnahme von Knochenchips, Entfernung von entzündlichem Gewebe (Zysten usw.).









Art.Nr.	Passend	Anzahl	Preis
US4	Passend für MECTRON®	1 Stück	60,00€

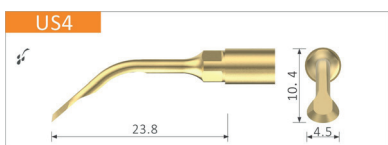

**Spezial-Mikrosäge (3 scharfe Zähne).** Sehr dünne und kleine Osteotomie- und Kortikotomietechnik für die kieferorthopädische Mikrochirurgie, Wurzelfraktionstechnik für Extraktionen.

Art.Nr.	Passend	Anzahl	Preis
US6	Passend für MECTRON®	1 Stück	70,00€

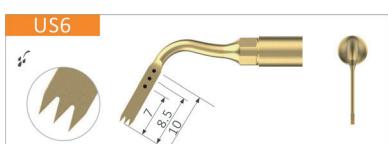

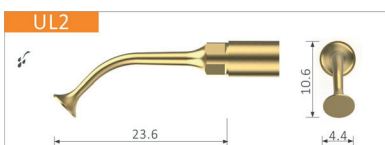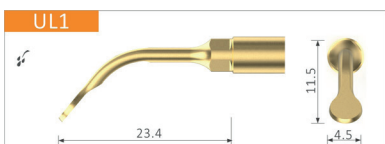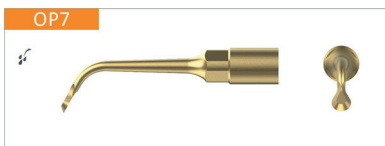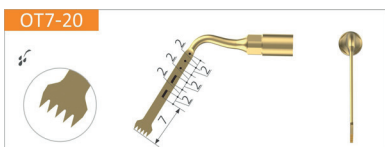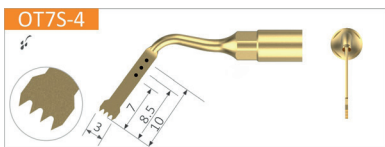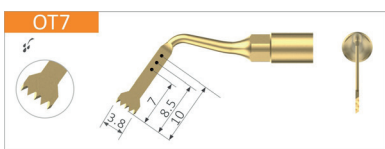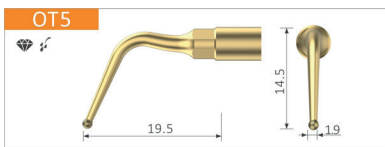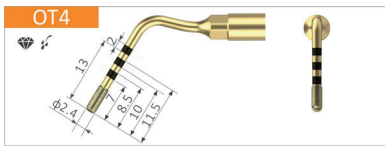

## Knochensägen

**Vorbereitung der Implantationsstelle.** Um die Achse der Pilotosteotomie zu korrigieren und die Vorbereitung der Implantationsstelle in der Nähe des Alveolarnervs abzuschließen. Sinuskrestale Zugangstechniken.

Art.Nr.	Passend	Anzahl	Preis
OT4	Passend für MECTRON®	1 Stück	90,00€

**Osteotomie & Osteoplastik.** Osteotom mit hoher Präzision in anatomisch dünnen Strukturen (z.B. Kieferkammerweiterung, interdentale Kortikotomien, Nasendornvorsatz).  
Diamantenkorngöße 96 µm.

Art.Nr.	Passend	Anzahl	Preis
OT5	Passend für MECTRON®	1 Stück	90,00€

**Haupt-Mikrosäge 0,55mm (5 Zähne).** Osteotomietechnik im Ober- und Unterkiefer, Kieferkammspaltung, Kortikotomietechnik und Knochenblocktransplantation.

Art.Nr.	Passend	Anzahl	Preis
OT7	Passend für MECTRON®	1 Stück	90,00€

**Spezial-Mikrosäge 0,35mm (4 Zähne).** Sehr dünne Osteotomie, Kortikotomie für kieferorthopädische Mikrochirurgietechniken, Le-Fort-Osteotomien, Wurzeltrennung in zahnärztlichen Extraktionstechniken und Parodontalchirurgie.

Art.Nr.	Passend	Anzahl	Preis
OT7S-4	Passend für MECTRON®	1 Stück	90,00€

**Effiziente Osteotomie (5 Zähne).** Kieferkammspaltung, Knochenblocktransplantation (vom Kinn-/ Unterkieferast), Le-Fort-I-Osteotomietechniken, bilaterale sagittale Splitosteotomie.

Art.Nr.	Passend	Anzahl	Preis
OT7-20	Passend für MECTRON®	1 Stück	90,00€

**Mikro-Wurzelvorbereitung.** Zur Wurzelvorbereitung in der Parodontalchirurgie.

Art.Nr.	Passend	Anzahl	Preis
OP6	Passend für MECTRON®	1 Stück	45,00€

**Mikro-Osteoplastik.** Für den periapikalen Knochenosteotomiezugang des Oberkiefers, um entzündliches Gewebe zu entfernen.

Art.Nr.	Passend	Anzahl	Preis
OP7	Passend für MECTRON®	1 Stück	45,00€

## Sinuslift

**Sinus-Membran-Separator, Winkel 130°.** Nicht schneidender Separator der Sinusmembran.




Art.Nr.	Passend	Anzahl	Preis
UL1	Passend für MECTRON®	1 Stück	60,00€

**Sinus-Membran-Separator.** Ablösen der Sinusmembran, 2mm um den Rahmen des Knochenfensters.

Art.Nr.	Passend	Anzahl	Preis
UL2	Passend für MECTRON®	1 Stück	60.00€

### Sinuslift

**Sensitives Knochenschneiden.** Wird zum Schneiden von Knochen in der Nähe von Weichgewebe oder empfindlichen Regionen mit minimalem Trauma verwendet. Kugelpopf, diamantbeschichtet.

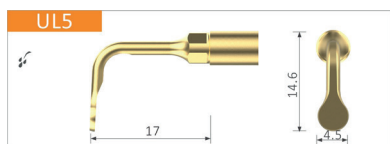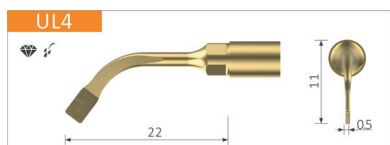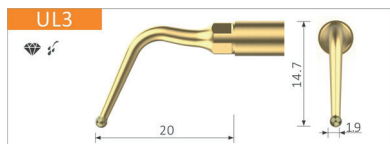

Art.Nr.	Passend	Anzahl	Preis
UL3	Passend für MECTRON®	1 Stück	90,00€

**Knochenfenster-Osteotomie.** Parodontale Osteotomie, Kronenverlängerung, Entnahme von Knochenchips, Entfernung von entzündlichem Gewebe (Zysten usw.).



Art.Nr.	Passend	Anzahl	Preis
UL4	Passend für MECTRON®	1 Stück	90,00€

**Sinus-Membran-Separator Winkel 105°.** Nicht schneidender Separator der Sinusmembran.

Art.Nr.	Passend	Anzahl	Preis
UL5	Passend für MECTRON®	1 Stück	60,00€


### Implantologie

**Erweiterung 1,6mm.** Wird verwendet, um den Implantationsbereich zu vergrößern und ein Weichteiltrauma zu vermeiden.

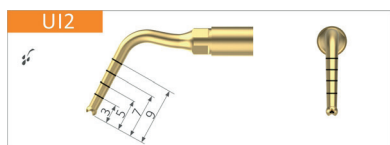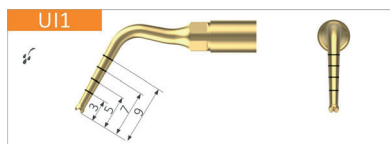

Art.Nr.	Passend	Anzahl	Preis
UI1	Passend für MECTRON®	1 Stück	60,00€


**Erweiterung 2,0mm.** Wird verwendet, um den Implantationsbereich zu vergrößern und ein Weichteiltrauma zu vermeiden.

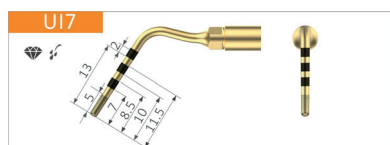

Art.Nr.	Passend	Anzahl	Preis
UI2	Passend für MECTRON®	1 Stück	60,00€


**Feine Präparation.** Zur endgültigen Vorbereitung von Implantationsstellen.

Art.Nr.	Passend	Anzahl	Preis
UI7	Passend für MECTRON®	1 Stück	60,00€

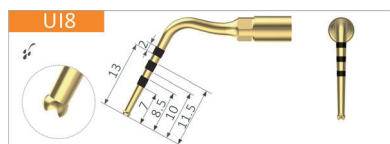


**Präparation.** Zur Erweiterung der Implantationsstelle. Maße 1,6mm x 15mm.

Art.Nr.	Passend	Anzahl	Preis
UI8	Passend für MECTRON®	1 Stück	60,00€

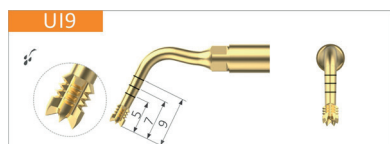

**Implantat Präparation.** 2,8mm Schneidkopf.


Art.Nr.	Passend	Anzahl	Preis
UI9	Passend für MECTRON®	1 Stück	90,00€

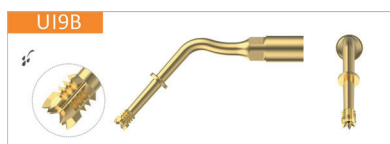

**Tiefe Präparation.** 2,8mm Schneidkopf.


Art.Nr.	Passend	Anzahl	Preis
UI9B	Passend für MECTRON®	1 Stück	90,00€

## Implantologie

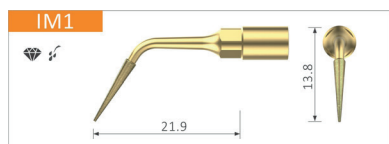


**Knochenperforation-diamantbeschichtet.** Konische Chirurgiespitze zur Knochenperforation. Empfohlen für die Pilotosteotomie an Extraktionsstellen und zur Überprüfung der Achsenausrichtung von PIN IM1-Präparationen.

Art.Nr.	Passend	Anzahl	Preis
IM1	Passend für MECTRON®	1 Stück	90,00€

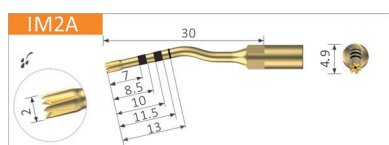


**Knochenperforation.** Richtungsgebende Osteotomie im anterioren Bereich (im Oberkiefer) mit Ausrichtungs-PIN 2-2.4AL prüfen.

Art.Nr.	Passend	Anzahl	Preis
IM2A	Passend für MECTRON®	1 Stück	90,00€

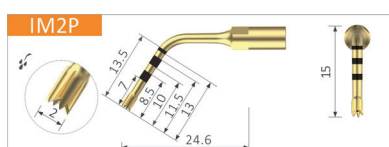


**Knochenperforation.** Knochenperforation. Richtungsgebende Osteotomie im posterioren Bereich(im Oberkiefer).

Art.Nr.	Passend	Anzahl	Preis
IM2P	Passend für MECTRON®	1 Stück	90,00€

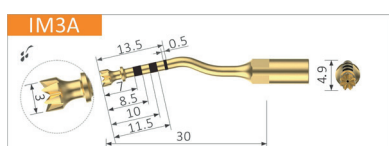


**Knochenperforation.** Um die Vorbereitung des Implantatbettes im anterioren Bereich zu vergrößern oder abzuschließen. Doppelt Spülen um eine Überhitzung im Oberkiefer zu vermeiden.

Art.Nr.	Passend	Anzahl	Preis
IM3A	Passend für MECTRON®	1 Stück	90,00€

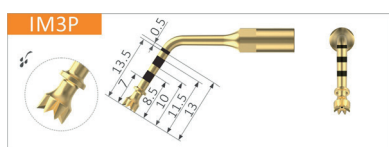


**Knochenperforation.** Um die Vorbereitung des Implantatbettes im posterioren Bereich zu vergrößern oder abzuschließen. Doppelt Spülen um eine Überhitzung im Oberkiefer zu vermeiden.

Art.Nr.	Passend	Anzahl	Preis
IM3P	Passend für MECTRON®	1 Stück	90,00€

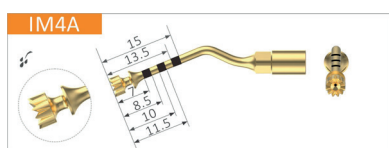


**Knochenperforation.** Zum Abschließen der anterioren Implantatbettaufbereitung. Doppelt Spülen um eine Überhitzung im Oberkiefer zu vermeiden.

Art.Nr.	Passend	Anzahl	Preis
IM4A	Passend für MECTRON®	1 Stück	90,00€

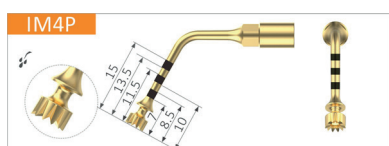


**Knochenperforation.** Zum Abschließen der posterioren Implantatbettaufbereitung. Doppelt Spülen um eine Überhitzung im Oberkiefer zu vermeiden.

Art.Nr.	Passend	Anzahl	Preis
IM4P	Passend für MECTRON®	1 Stück	90,00€

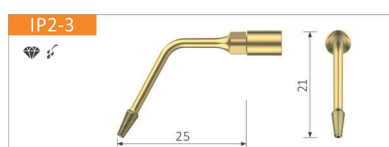

**Mikrometische Osteotomie.** Zur Optimierung der Konzentrizität der Aufbereitung des Implantatbereichs von Ø 2-3 mm.

Art.Nr.	Passend	Anzahl	Preis
IP2-3	Passend für MECTRON®	1 Stück	90,00€

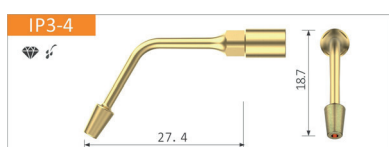


**Mikrometische Osteotomie.** Zur Optimierung der Konzentrizität der Aufbereitung des Implantatbereichs von Ø 3-4 mm.

Art.Nr.	Passend	Anzahl	Preis
IP3-4	Passend für MECTRON®	1 Stück	90,00€

## Endodontie


**Effiziente Kanalreinigung lang.** Débridement der apikalen Wurzel. Diamantbeschichtet.

Art.Nr.	Passend	Anzahl	Preis
UE1	Passend für MECTRON®	1 Stück	90,00€

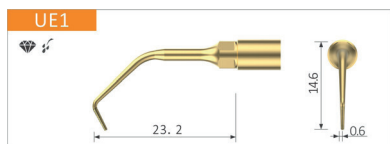


**Sanfte Kanalreinigung lang.** Sanftes apikales Wurzeldébridement.

Art.Nr.	Passend	Anzahl	Preis
UE2	Passend für MECTRON®	1 Stück	90,00€

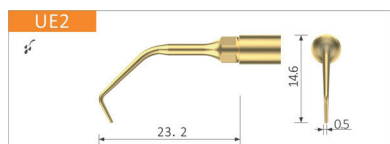


**Effiziente Kanalreinigung.** Débridement der apikalen Wurzel. Diamantbeschichtet.

Art.Nr.	Passend	Anzahl	Preis
UE3	Passend für MECTRON®	1 Stück	90,00€

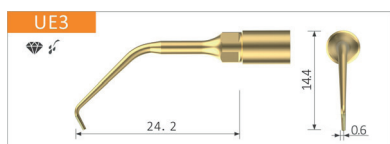

**Sanfte Kanalreinigung.** Sanftes apikales Wurzeldébridement.


Art.Nr.	Passend	Anzahl	Preis
UE4	Passend für MECTRON®	1 Stück	90,00€

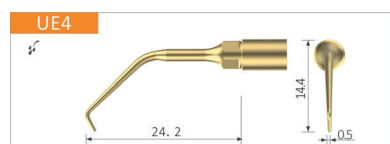

## Extraktion


**Extraktionsskalpell.** Wurzelosteoplastik zum Abschneiden der Ankylose, Wurzelfraktions-techniken.

Art.Nr.	Passend	Anzahl	Preis
EX1	Passend für MECTRON®	1 Stück	90,00€

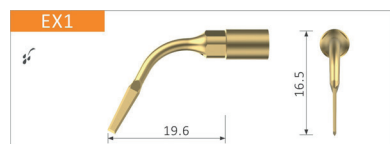


**Links gewinkeltes Extraktionsskalpell.** Wurzelosteoplastik in posterioren Bereichen.

Art.Nr.	Passend	Anzahl	Preis
EX2	Passend für MECTRON®	1 Stück	90,00€

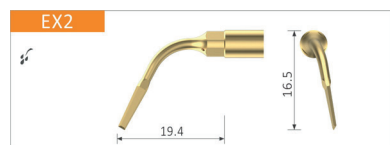


**Rechts gewinkeltes Extraktionsskalpell.** Wurzelosteoplastik in posterioren Bereichen.

Art.Nr.	Passend	Anzahl	Preis
EX3	Passend für MECTRON®	1 Stück	90,00€

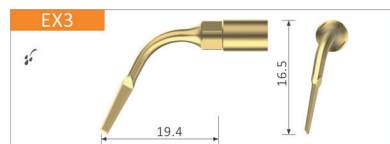


**Zahnteilung.** Sägezahnspitze besonders effizient bei Hemisektionen und Wurzelpartitionen.

Art.Nr.	Passend	Anzahl	Preis
XM-NINJA	Passend für MECTRON®	1 Stück	90,00€

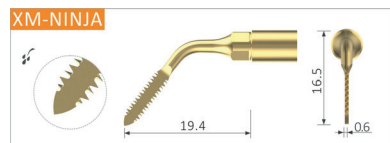

**Extraktionsskalpell.** Wurzelosteoplastik zum Abschneiden der Ankylose, Wurzelfraktionstechniken.


Art.Nr.	Passend	Anzahl	Preis
UC1	Passend für MECTRON®	1 Stück	70,00€

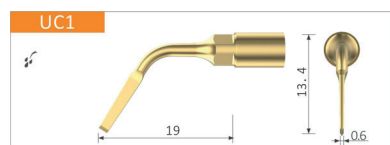




## Scaling & Parodontologie

### Sanftes Scaling. Wurzelscaling.

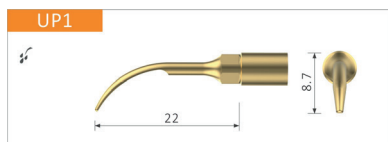


Art.Nr.	Passend	Anzahl	Preis
UP1	Passend für MECTRON®	1 Stück	45,00€

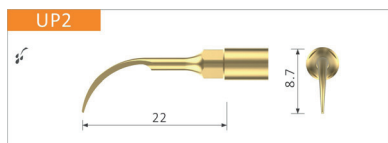


### Parodontal-Scaler. Scaling und Entfernung von entzündlichem Gewebe, Extraktion von frakturierten Wurzelspitzen.

Art.Nr.	Passend	Anzahl	Preis
UP2	Passend für MECTRON®	1 Stück	45,00€

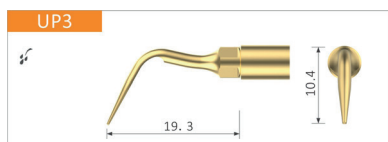


### Gewinkelte Kürette. Wurzelscaling.

Art.Nr.	Passend	Anzahl	Preis
UP3	Passend für MECTRON®	1 Stück	45,00€

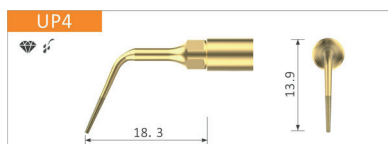


### Scaling und Mikro-Débridement. Wurzel-Débridement und Wurzelglättung während der resektiven und regenerativen Parodontalchirurgie. Diamantbeschichtet.

Art.Nr.	Passend	Anzahl	Preis
UP4	Passend für MECTRON®	1 Stück	45,00€

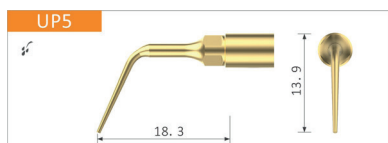


### Mikro-Wurzelglättung. Wurzelhobeln.

Art.Nr.	Passend	Anzahl	Preis
UP5	Passend für MECTRON®	1 Stück	45,00€

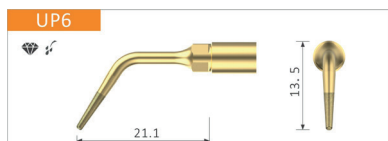

### Mikro-Wurzelpräparation. Wurzelpräparation in der Parodontalchirurgie. Diamantbeschichtet.

Art.Nr.	Passend	Anzahl	Preis
UP6	Passend für MECTRON®	1 Stück	45,00€

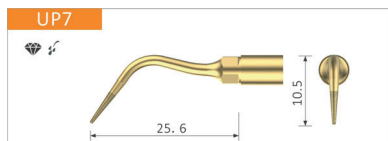

### Mikro-Osteoplastik. Interproximale Osteoplastik und Wurzelglättung. Diamantbeschichtet.

Art.Nr.	Passend	Anzahl	Preis
UP7	Passend für MECTRON®	1 Stück	45,00€



### Knochenchirurgie

**Kortikale Knochensäge (4 Zähne).** Säge zum schneiden vom kortikalem Knochen in der chirurgischen Kieferorthopädie, Präimplantationschirurgie und Knochendistraktion.

Art.Nr.	Passend	Anzahl	Preis
E-BS1	Passend für EMS®	1 Stück	60,00€

**Kortikale Knochensäge links.** Linksgerichtete Knochensäge zum Schneiden des Ramus Kortikalis.

Art.Nr.	Passend	Anzahl	Preis
E-BS2L	Passend für EMS®	1 Stück	70,00€

**Kortikale Knochensäge rechts.** Rechtsgerichtete Knochensäge zum Schneiden des Ramus Kortikalis.

Art.Nr.	Passend	Anzahl	Preis
E-BS2R	Passend für EMS®	1 Stück	70,00€

**Kreisförmiges Skalpell.** Kreisförmiges Skalpell bei 130° zur Osteoplastik und Entnahme von Knochenpartikeln oder -spänen.

Art.Nr.	Passend	Anzahl	Preis
E-BS4	Passend für EMS®	1 Stück	60,00€

**Flaches Skalpell.** Zur Distraktion von feinen Osteotomien und der Präparation des bukkalen Knochenlappens.

Art.Nr.	Passend	Anzahl	Preis
E-BS5	Passend für EMS®	1 Stück	60,00€

**Spezielle Mikrosäge (4 Zähne).** Osteotomietechnik im Ober- und Unterkiefer, Kieferkammerweiterung, Kortikotomietechnik und Knochenblocktransplantation.

Art.Nr.	Passend	Anzahl	Preis
E-BS6F	Passend für EMS®	1 Stück	90,00€

**Gebogenes Skalpell.** Effektiv für Umformung des Knochens. Es wird verwendet, um Osteoplastiken und Umformungen des Knochens durchzuführen, ohne den Zahnhalt zu gefährden. Kann auch verwendet werden, um einen prothetischen Referenzpunkt auf dem Zahnschmelz zu markieren, an dem die Osteoplastik beginnen soll.

Art.Nr.	Passend	Anzahl	Preis
E-BS6	Passend für EMS®	1 Stück	60,00€

### Sinuslift

**Osteotomie des Sinus-Knochenfensters.** Diamantbeschichtete Spitze für vestibulären Knochenfensterschnitt und Dämpfung scharfer Winkel.

Art.Nr.	Passend	Anzahl	Preis
E-SL1	Passend für EMS®	1 Stück	90,00€

**Mikrometrische Osteoplastik.** Diamantbeschichteter Kugelkopf zum Glätten des vestibulären Knochenfensters und zur präzisen Osteoplastik.

Art.Nr.	Passend	Anzahl	Preis
E-SL2	Passend für EMS®	1 Stück	90,00€

### Sinuslift

**Sinus-Membran-Separator.** Die nicht schneidende Spitze dient zur Schneiderschen Membranerhöhung an den Rändern des Fensters.

Art.Nr.	Passend	Anzahl	Preis
E-SL3	Passend für EMS®	1 Stück	60,00€

**Sinus-Membran-Elevator.** 90° gewinkelter, nicht schneidender Spatel (4mm) ermöglicht eine tiefe Benetzung der Sinusmembran innerhalb der Nebenhöhle.

Art.Nr.	Passend	Anzahl	Preis
E-SL4	Passend für EMS®	1 Stück	60,00€

**Nicht-schneidender Spatel.** Nicht-schneidender Spatel zur Elevation der Schneiderschen Membran im Sinus und zum Lösen anatomischer Strukturen.

Art.Nr.	Passend	Anzahl	Preis
E-SL5	Passend für EMS®	1 Stück	60,00€

### Extraktion

**Wurzelosteoplastik.** Wird für Syndesmotome und periradikuläre Osteotomie verwendet.

Art.Nr.	Passend	Anzahl	Preis
E-LC1	Passend für EMS®	1 Stück	90,00€

**Extraktionsskalpell.** Wird zum durchtrennen von Bändern mit minimalem Trauma beim Herausziehen fester und solider Zähne verwendet.

Art.Nr.	Passend	Anzahl	Preis
E-LC1/90	Passend für EMS®	1 Stück	90,00€

**Schlanke Skalpell.** Schlanke Spitze, besonders schmal, ermöglicht den Zugang zu den engen Räumen zwischen Wurzel und Alveolarknochen.

Art.Nr.	Passend	Anzahl	Preis
E-LC2	Passend für EMS®	1 Stück	90,00€

**Gewinkeltes Skalpell.** 45° nach links ausgerichtet, erleichtert den Zugang zu den Seitenzahnbereichen.





Art.Nr.	Passend	Anzahl	Preis
E-LC2L	Passend für EMS®	1 Stück	90,00€

**Gewinkeltes Skalpell.** 45° nach rechts ausgerichtet, erleichtert den Zugang zu den Seitenzahnbereichen.

Art.Nr.	Passend	Anzahl	Preis
E-LC2R	Passend für EMS®	1 Stück	90,00€

**Wurzelamputator.** Diese Sägezahnspitze ist besonders effizient bei Hemisektionen und Wurzelamputationen.

Art.Nr.	Passend	Anzahl	Preis
E-Pirahna	Passend für EMS®	1 Stück	90,00€

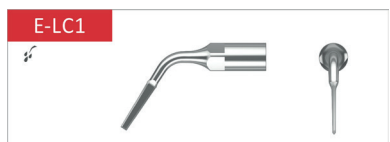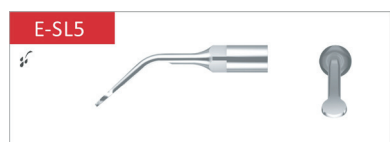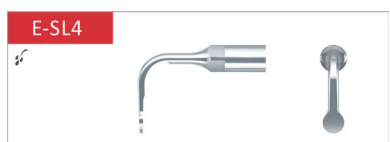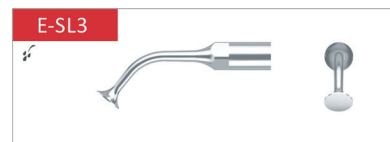

### Knochenchirurgie

**Kortikale Knochensäge (4 Zähne).** Säge zum Schneiden von kortikalem Knochen in der chirurgischen Kieferorthopädie, Präimplantationschirurgie und Knochendistraktion.

Art.Nr.	Passend	Anzahl	Preis
BS1	Passend für Satelec® Piezotome 1	1 Stück	90,00€
V-BS1	Passend für Satelec® Piezotome 2	1 Stück	90,00€

**Linksgerichtete Knochensäge.** Knochensäge linksgerichtet zum Schneiden des Ramus Kortikalis.

Art.Nr.	Passend	Anzahl	Preis
BS2L	Passend für Satelec® Piezotome 1	1 Stück	99,00€
V-BS2L	Passend für Satelec® Piezotome 2	1 Stück	99,00€

**Rechtsgerichtete Knochensäge.** Knochensäge rechtsgerichtet zum Schneiden des Ramus Kortikalis.

Art.Nr.	Passend	Anzahl	Preis
BS2R	Passend für Satelec® Piezotome 1	1 Stück	99,00€
V-BS2R	Passend für Satelec® Piezotome 2	1 Stück	99,00€

**Kreisförmiges Skalpell.** Kreisförmiges Skalpell Winkel 130° zur Osteoplastik und Entnahme von Knochenpartikeln oder -spänen.

Art.Nr.	Passend	Anzahl	Preis
BS4	Passend für Satelec® Piezotome 1	1 Stück	90,00€
V-BS4	Passend für Satelec® Piezotome 2	1 Stück	90,00€

**Flaches Skalpell.** Flaches Skalpell zur Distraktion von feinen Osteotomien und Präparation des bukkalen Knochenlappens.

Art.Nr.	Passend	Anzahl	Preis
BS5	Passend für Satelec® Piezotome 1	1 Stück	90,00€
V-BS5	Passend für Satelec® Piezotome 2	1 Stück	90,00€

**Gebogenes Skalpell.** Effektiv für Umformung des Knochens. Es wird verwendet, um Osteoplastiken und Umformungen des Knochens durchzuführen, ohne den Zahnhalt zu gefährden. Kann auch verwendet werden, um einen prothetischen Referenzpunkt auf dem Zahnschmelz zu markieren, an dem die Osteoplastik beginnen soll.

Art.Nr.	Passend	Anzahl	Preis
BS6	Passend für Satelec® Piezotome 1	1 Stück	90,00€
V-BS6	Passend für Satelec® Piezotome 2	1 Stück	90,00€

### Implantation

**Knochenperforation-diamantbeschichtet.** Konische Chirurgiespitze zur Knochenperforation. Empfohlen für die Pilotosteotomie an Extraktionsstellen und zur Überprüfung der Achsenausrichtung von PIN IM1-Präparationen.

Art.Nr.	Passend	Anzahl	Preis
XS-IM1	Passend für Satelec® Piezotome 1	1 Stück	99,00€
V-XS-IM1	Passend für Satelec® Piezotome 2	1 Stück	99,00€

**Knochenperforation.** Vorbereitung des Implantatbetts, insbesondere Knochenperforation. Besonders wirksam für die Pilotosteotomie im vorderen und hinteren (Oberkiefer) Bereich oder zur Kontrolle der Achsenausrichtung der Präparationen 2 PIN 2-2,4.

Art.Nr.	Passend	Anzahl	Preis
XS-IM2A	Passend für Satelec® Piezotome 1	1 Stück	99,00€
V-XS-IM2A	Passend für Satelec® Piezotome 2	1 Stück	99,00€

**Knochenperforation.** Zur Vergrößerung oder Vervollständigung der Vorbereitung der Implantationsstelle. Mit doppelter Spülung einführen, um eine Überhitzung im Oberkiefer zu vermeiden.

Art.Nr.	Passend	Anzahl	Preis
XS-IM3A	Passend für Satelec® Piezotome 1	1 Stück	99,00€
V-XS-IM3A	Passend für Satelec® Piezotome 2	1 Stück	99,00€

### Sinuslift

**Osteotomie des Sinus-Knochenfensters.** Diamantbeschichtete Spitze für den vestibulären Knochenfensterschnitt und die Dämpfung scharfer Winkel.

Art.Nr.	Passend	Anzahl	Preis
SL1	Passend für Satelec® Piezotome 1	1 Stück	99,00€
V-SL1	Passend für Satelec® Piezotome 2	1 Stück	99,00€

**Mikrometrische Osteoplastik.** Diamantbeschichtete Kugelkopf zum Glätten des vestibulären Knochenfensters und zur präzisen Osteoplastik.

Art.Nr.	Passend	Anzahl	Preis
SL2	Passend für Satelec® Piezotome 1	1 Stück	99,00€
V-SL2	Passend für Satelec® Piezotome 2	1 Stück	99,00€

**Sinus-Membran-Separator.** Die nicht schneidende Spitze dient zur Schneiderschen Membranerhöhung an den Rändern des Fensters.

Art.Nr.	Passend	Anzahl	Preis
SL3	Passend für Satelec® Piezotome 1	1 Stück	90,00€
V-SL3	Passend für Satelec® Piezotome 2	1 Stück	90,00€

**Sinus-Membran-Elevator.** Winkel 90°, nicht schneidender Spatel (4mm) ermöglicht eine tiefe Benetzung der Sinusmembran innerhalb der Nebenhöhle.

Art.Nr.	Passend	Anzahl	Preis
SL4	Passend für Satelec® Piezotome 1	1 Stück	90,00€
V-SL4	Passend für Satelec® Piezotome 2	1 Stück	90,00€

**Nicht schneidender Spatel.** Nicht schneidender Spatel zur Elevation der Schneiderschen Membran im Sinus und zum Lösen anatomischer Strukturen.

Art.Nr.	Passend	Anzahl	Preis
SL5	Passend für Satelec® Piezotome 1	1 Stück	90,00€
V-SL5	Passend für Satelec® Piezotome 2	1 Stück	90,00€

### Extraktion

**Wurzelosteoplastik.** Wird für Syndesmotomie und periradikuläre Osteotomie verwendet.

Art.Nr.	Passend	Anzahl	Preis
LC1	Passend für Satelec® Piezotome 1	1 Stück	99,00€
V-LC1	Passend für Satelec® Piezotome 2	1 Stück	99,00€

**Extraktionsskalpell.** Wird zum durchtrennen von Bändern mit minimalem Trauma beim Herausziehen fester und solider Zähne verwendet.



Art.Nr.	Passend	Anzahl	Preis
LC1/90	Passend für Satelec® Piezotome 1	1 Stück	99,00€
V-LC1/90	Passend für Satelec® Piezotome 2	1 Stück	99,00€

**Schlanke Skalpell.** Schlanke Spitze, besonders schmal, ermöglicht den Zugang zu den engen Räumen zwischen Wurzel und Alveolarknochen.

Art.Nr.	Passend	Anzahl	Preis
LC2	Passend für Satelec® Piezotome 1	1 Stück	99,00€
V-LC2	Passend für Satelec® Piezotome 2	1 Stück	99,00€

**Gewinkeltes Skalpell.** 45° nach links ausgerichtet, Spitze erleichtert den Zugang zu den Seitenzahnbereichen.

Art.Nr.	Passend	Anzahl	Preis
LC2L	Passend für Satelec® Piezotome 1	1 Stück	99,00€
V-LC2L	Passend für Satelec® Piezotome 2	1 Stück	99,00€

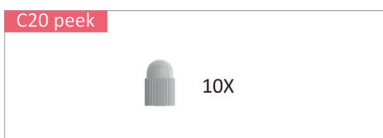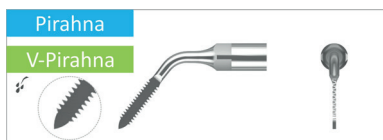

## Passende für Satelec® chirurgische Geräte

Piezotome 1

Piezotome 2

### Extraktion

**Gewinkeltes Skalpell.** 45° nach rechts ausgerichtet, Spitze erleichtert den Zugang zu den Seitenzahnbereichen.

Art.Nr.	Passend	Anzahl	Preis
LC2R	Passend für Satelec® Piezotome 1	1 Stück	99,00€
V-LC2R	Passend für Satelec® Piezotome 2	1 Stück	99,00€

**Wurzelamputator.** Die Sägezahnspitze ist besonders effizient bei Hemisektionen und Wurzelamputationen.

Art.Nr.	Passend	Anzahl	Preis
Pirahna	Passend für Satelec® Piezotome 1	1 Stück	99,00€
V-Pirahna	Passend für Satelec® Piezotome 2	1 Stück	99,00€

## Zementieren von Keramikinlays, Onlays und Veneers.

**C20 Set.** Zum zementieren von Keramikinlays, Onlays und Veneers.  
Bestehend aus: 1x eC20 & 2 Ersatz-Peeks

Art.Nr.	Passend	Anzahl	Preis
e20 Set	Passend für EMS®	1 Set	51,00€
n20 Set	Passend für NSK®	1 Set	51,00€
s20 Set	Passend für Satelec®	1 Set	51,00€

### C20 Peek Nachfüllpackung 10 Stück


Art.Nr.	Passend	Anzahl	Preis
C20Peek	Passend für EMS®, NSK®, Satelec®	10 Stück	90,00€

## Drehmomentschlüssel & Zubehör

### Drehmomentschlüssel & Zubehör

Art.Nr.	Passend für	Material	Anzahl	Preis
TW P	EMS®	Kunststoff	1 Stück	24,00€
TW SAT P	Satelec®	Kunststoff	1 Stück	24,00€
TW P	NSK®	Kunststoff	1 Stück	24,00€
TW SIR P	Sirona®	Kunststoff	1 Stück	29,00€
TW MEC M	Mectron®	Metall	1 Stück	46,00€
TW KAV Q	KaVo®	Metall	1 Stück	46,00€
TW KAV M	KaVo® PiezoLED & PIEZOsoft	Metall	1 Stück	46,00€
W ENDO	Endoschlüssel		1 Stück	9,00€
ICP WREN	ICP Schlüssel		1 Stück	9,00€
KICP WREN	Schlüssel nur für KAVO ICP-Spitze		1 Stück	13,00€
TH WC	Spitzenhalter mit Deckel		1 Stück	29,00€
TH	Spitzenhalter ohne Deckel		1 Stück	21,00€




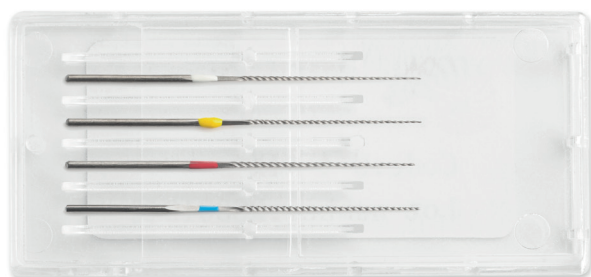

### U-Feilen Set (32 mm)

Dieses Set enthält je eine Feile mit dem Durchmesser 0,15mm, 0,20mm, 0,25mm & 0,30mm

Art.Nr.	Durchmesser	Inhalt	Preis
xp-UF15/32	0,15mm	10 Stück	31,00€
xp-UF20/32	0,20mm	10 Stück	31,00€
xp-UF25/32	0,25mm	10 Stück	31,00€
xp-UF30/32	0,30mm	10 Stück	31,00€
xp-UFSet32	0,15-0,30mm	4 Stück	13,00€

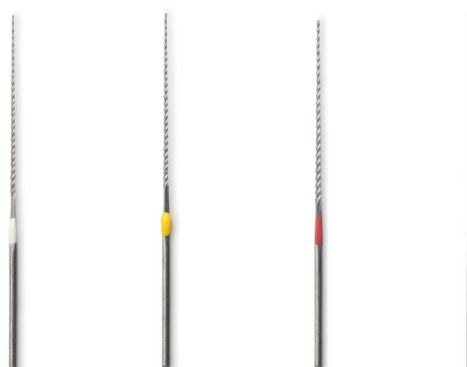

### Achtung

Unsere U-Files funktionieren mit den folgenden Feilenhaltern:  
E1, ES1, EN1, ED1, E2, ES2, EN2, ED2 und k222.



Xpedent Handstücke werden aus Aluminium hergestellt. Sie sind daher in der Lage, das Autoklavieren ohne die bei Kunststoffhandstücken häufig auftretenden äußeren Rissprobleme zu überstehen.

Sie sind passend für EMS®- und Satelec®-Maschinen. LED-Handstücke haben einen anderen Anschluss als Nicht-LED-Handstücke (siehe Bilder).

### Handstücke passend für EMS®

Passend für EMS® ohne LED



Art.Nr.	Passend für	Anzahl	Preis
XP-YE	EMS®	1 Stück	150,00€

### Handstücke passend für SATELEC®

Passend für SATELEC® ohne LED



Art.Nr.	Passend für	Anzahl	Preis
XP-YS	SATELEC®	1 Stück	150,00€

Passend für EMS® mit LED



Art.Nr.	Passend für	Anzahl	Preis
XP-YE7.LED	EMS®	1 Stück	170,00€

Passend für SATELEC® mit LED



Art.Nr.	Passend für	Anzahl	Preis
XP-YS8.LED	SATELEC®	1 Stück	170,00€





OPTIM Interdentalbürsten von Stoddard sind speziell für die gründliche Reinigung der größeren Zahnzwischenräume und um Brücken und Zahnsparanten herum konzipiert. Sie sind unerlässlich, um Plaquebildung vorzubeugen und gesunde Zähne und Zahnfleisch zu fördern. Sie werden nur aus den hochwertigsten Materialien hergestellt. Der hoch zugfeste, kunststoffbeschichtete Edelstahldraht im Kern verhindert, dass sich die Bürsten verbiegen. Für eine längere Lebensdauer werden die Borsten aus demselben formstabilen Nylon hergestellt, das auch für Zahnbürsten verwendet wird. Die Bürste wird durch ein revolutionäres Produktionsverfahren am Griff befestigt, sodass es praktisch unmöglich ist, dass sie sich voneinander lösen.



Artikelnummer	ID001	ID121	ID120	ID0119	ID118	ID117	ID116	ID115	ID114
Material	hoch zugfester, kunststoffummantelter Edelstahldraht mit Nylonfilamenten								
Farbe	Weiß	Pink	Orange	Rot	Blau	Gelb	Grün	Lila	Grau
Größe	SF	XXXXF	XXXF	XXF	XF	F	M	L	XL
Nylon Ø mm	1,6	1,8	2,0	2,5	3,0	3,5	5,0	6,0	9,0
Kopflänge mm	10,0	10,5	11,0	11,0	13,0	13,0	13,0	13,0	13,0
Draht mm	0,35	0,4	0,45	0,5	0,6	0,7	0,8	1,1	1,3
ISO 16409 Größe	00	0	1	2	3	4	5	6	7
Packungsinhalt	8 / 25	8 / 25	8 / 25	8 / 25	8 / 25	8 / 25	8 / 25	8 / 25	8 / 25



Art.-Nr. SET3031

**Klinik Box SET3031**  
beinhaltet je 10 Stück  
von ID001, ID121, ID120,  
ID119, ID118, ID117, ID116,  
ID115 and ID114  
Inhalt gesamt: 90 Stück

Art.-Nr.	Inhalt	Preis
ID001	8 Stück	3,14€
ID001	25 Stück	9,50€
ID121	8 Stück	3,14€
ID121	25 Stück	9,50€
ID120	8 Stück	3,14€
ID120	25 Stück	9,50€
ID119	8 Stück	3,14€
ID119	25 Stück	9,50€
ID118	8 Stück	3,14€
ID118	25 Stück	9,50€
ID117	8 Stück	3,14€
ID117	25 Stück	9,50€
ID116	8 Stück	3,14€
ID116	25 Stück	9,50€
ID115	8 Stück	3,14€
ID115	25 Stück	9,50€
ID/STODSTAND	9 Stück	12,50€
SET3031	90 Stück	29,95€



Art.-Nr. ID/STODSTAND

**Kleiner OPTIM Display Ständer**  
bestückt mit 9 OPTIM  
Interdentalbürsten

# Unser Prophylaxe- Sortiment

Das größte und umfangreichste Sortiment an Bürsten, Kelchen und Spitzen für die Prophylaxe auf dem Markt.



Das gesamte Sortiment finden Sie auf den unten aufgeführten Internetseiten.



## Vertrieb durch:

### Dental Contact Vertriebs KG

Im Spiet 101  
D 26506 Norden  
Telefon 04931 9809681

[info@dental-contact.de](mailto:info@dental-contact.de)  
[www.dental-contact.de](http://www.dental-contact.de)



### Dental Contact Vertriebs KG

Hauptstraße 52  
AT 2381 Laab im Walde  
Telefon 0676 4655990

[info@dental-contact.at](mailto:info@dental-contact.at)  
[www.dental-contact.at](http://www.dental-contact.at)

